


Réglage de l'indicateur d'hypoglycémie (ⓘ)

L'indicateur d'hypoglycémie :

- Peut être réglé à un seuil compris entre 2,8 et 5,0 mmol/L pour vous avertir en cas d'une valeur de glycémie trop basse.


Remarques :

- Avant de régler l'indicateur d'hypoglycémie, consultez votre professionnel de la santé qui vous conseillera la valeur d'hypoglycémie à définir dans votre cas.
- L'indicateur d'hypoglycémie de votre nouveau glycomètre est désactivé (« OFF »).

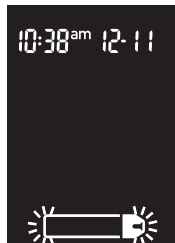



1. Appuyez et relâchez la touche ⓘ pour allumer le glycomètre. Le symbole de la bandelette-test clignotante s'affiche.






2. Appuyez sur la touche  **et maintenez-la enfoncée** jusqu'à ce que l'indication « set-up » s'affiche à l'écran.



3. Appuyez et relâchez la touche  autant de fois que nécessaire pour afficher l'indication « set-up » et « OFF », ainsi que le symbole  clignotant à l'écran.



4. Appuyez et relâchez la touche  ou  pour passer de « On » à « OFF ». Appuyez et relâchez la touche  pour confirmer votre choix.


5. Si vous avez activé (« On ») l'indicateur d'hypoglycémie, l'indication « set-up » s'affiche et le symbole ⚠ clignote. L'écran affiche 3,9 mmol/L.



6. Appuyez et relâchez la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner le seuil souhaité. Appuyez et relâchez la touche ⏸ pour le confirmer.



7. Pour sortir du mode réglage, appuyez sur la touche ⏸ et **maintenez-la enfoncée** jusqu'à l'affichage du symbole de la bandelette-test clignotante.

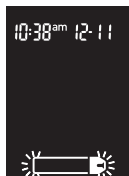

Cette fonction ne remplace pas la formation sur l'hypoglycémie offerte par votre professionnel de la santé.