

Réglage de l'heure du rappel postprandial (après le repas) (🍎🔔)

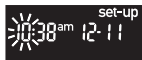
Le rappel postprandial (après le repas) :




- émet des signaux sonores une ou deux heures après l'analyse pour vous rappeler d'effectuer une analyse postprandiale (après le repas).
- émet des signaux sonores toutes les deux minutes et à trois reprises au maximum.
- cesse d'émettre des signaux sonores dès qu'une bandelette-test est insérée ou que vous appuyez sur une touche.

L'heure du rappel postprandial (après le repas) de votre glycomètre est pré-réglée à deux heures après votre repas, mais il est possible de le régler à une heure après le repas en mode réglage.

Remarques :

- Pour que le rappel puisse être émis, le signal sonore doit être activé (« On »).
- Aucun rappel n'est émis si l'analyse est effectuée dans les 15 minutes précédant le moment auquel le rappel a été programmé.
- Aucun rappel n'est émis si le glycomètre est allumé au moment de l'heure programmée.
- L'exposition à des températures froides peut empêcher l'émission des rappels jusqu'à ce que le glycomètre soit rallumé.



1. Appuyez et relâchez la touche  pour allumer le glycomètre. Le symbole de la bandelette-test clignotante s'affiche.
2. Appuyez sur la touche  **et maintenez-la enfoncée** jusqu'à ce que l'indication « set-up » s'affiche à l'écran.
3. Appuyez et relâchez la touche  autant de fois que nécessaire pour afficher l'indication « set-up » et l'indication clignotante « 1Hr » (1 heure) ou « 2Hr » (2 heures) à l'écran.



4. Appuyez et relâchez la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner « 1Hr » ou « 2Hr ». Appuyez et relâchez la touche Ⓜ pour confirmer votre choix.



Cet écran s'affiche lorsqu'un rappel postprandial (après le repas) a été activé.