

Découvrez l'application mySugr!



Bienvenue dans la famille mySugr!

Alors, sortez vos téléphones intelligents, allumez le volume et allons-y!

Découvrez l'application mySugr!

Téléchargez l'application

Commençons par télécharger l'application

- 1 En fonction du type de téléphone que vous utilisez, appuyez sur l'icône App Store ou Google Play.




Dans la barre de recherche, entrez « mySugr »
- C'est M-Y-S-U-G-R.

*Vous pouvez accéder aux boutons de téléchargement via la page mySugr: <https://www.accu-chek.ca/fr/mysugr-app>.


- 2 L'avez-vous trouvé? Bien! Maintenant, cliquez sur télécharger.
- 3 Une fois l'application téléchargée, cliquez sur l'icône mySugr.
- 4 Créez votre compte mySugr gratuit. Utilisez une adresse électronique à laquelle vous pouvez facilement accéder sur votre téléphone.
- 5 Allez dans votre email pour récupérer le code de vérification envoyé à votre email.
- 6 Entrez le code dans mySugr pour vérifier le compte.

Génial! À présent, nous sommes prêts à configurer votre profil.

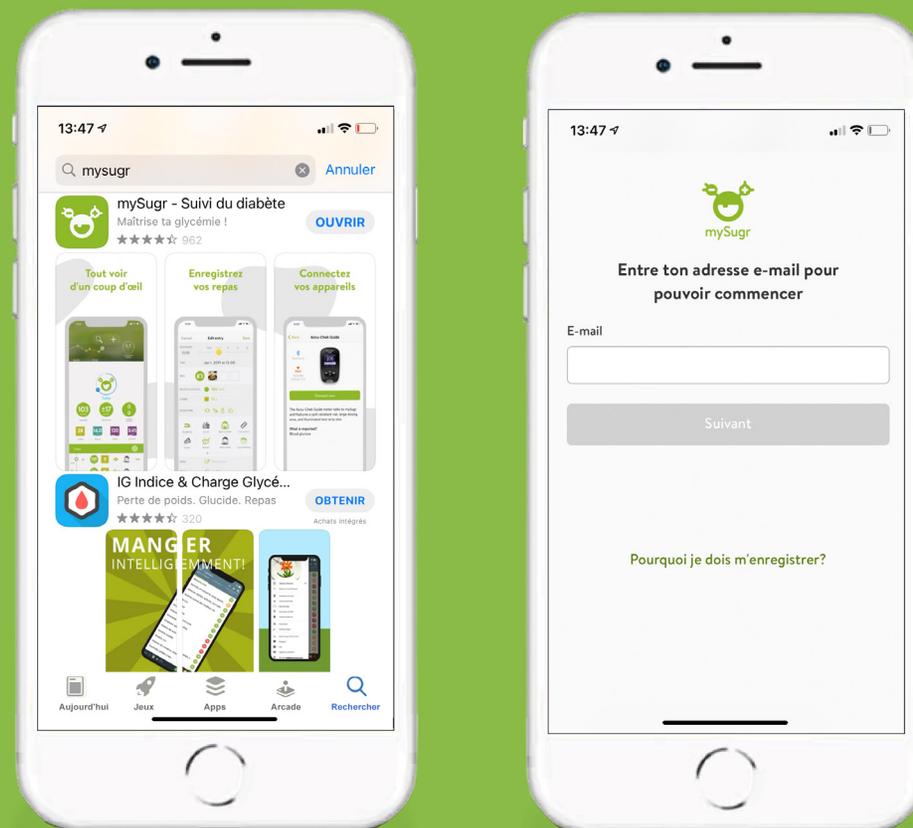

Découvrez l'application mySugr!

Créez votre profil

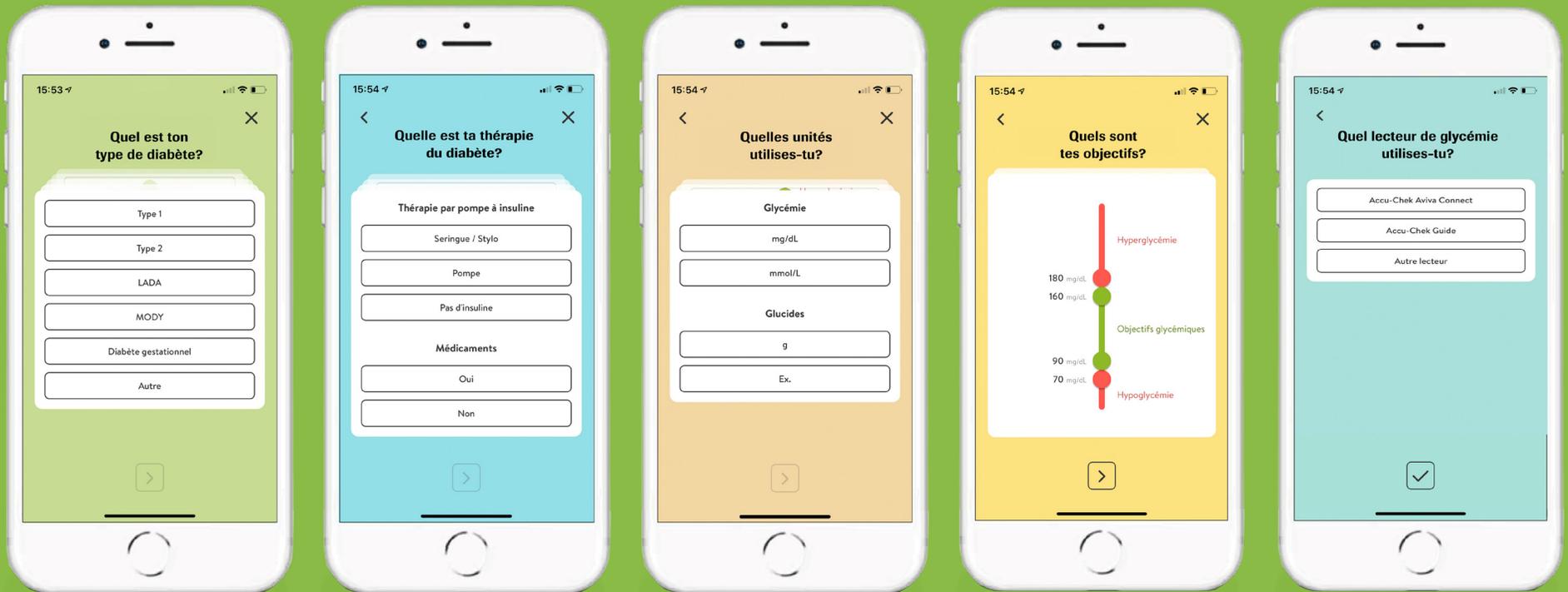

mySugr vous posera une série de questions; répondez-y en fonction de votre profil de diabète et de votre type de traitement.

Liez avec votre glycomètre Accu-Chek® Guide

Liez maintenant l'application mySugr à un glycomètre Accu-Chek Guide!

- 1 Allumez le lecteur Accu-Chek Guide en maintenant le bouton OK enfoncé jusqu'à ce que le lecteur s'allume.
- 2 Dans le menu principal, à l'aide de la flèche vers le bas, sélectionnez «réglages», puis appuyez sur «OK».
- 3 Utilisez la flèche vers le bas pour accéder au menu, sélectionnez «sans fil», puis appuyez sur «OK».
- 4 Utilisez la flèche vers le bas pour descendre jusqu'à l'option «liaisons», puis appuyez sur «OK».
- 5 Votre glycomètre générera un code.

Mettez votre glycomètre de côté et revenez à l'application mySugr maintenant

- 1 Tout d'abord, assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre téléphone ait été activée.
- 2 Dans l'application mySugr, appuyez sur «connexions» en bas de l'écran.
- 3 Sélectionnez «Accu-Chek Guide» dans la liste des appareils disponibles.
- 4 Appuyez sur le bouton vert «connecter maintenant».
- 5 Attendez que l'application détecte votre glycomètre. Sélectionnez le glycomètre qui apparaît sur votre écran.
*Si plus d'un glycomètre apparaît, sélectionnez celui qui correspond au numéro de série de votre glycomètre, qui se trouve à l'arrière de votre glycomètre.
- 6 Entrez le code affiché sur l'écran du glycomètre.
- 7 Attendez que l'application confirme la liaison.

Bien joué! Vous êtes fin prêt!

