

ACCU-CHEK® Guide



MANUEL DE L'UTILISATEUR

GLYCOMÈTRE



Contents

Introduction	2
Chapitre 1 : Votre nouveau système	5
Chapitre 2 : Analyses de glycémie	11
Chapitre 3 : Tests de contrôle	21
Chapitre 4 : Réglages du glycomètre.....	25
Chapitre 5 : Consultation des données	36
Chapitre 6 : Communication sans fil et liaison du glycomètre.....	45
Chapitre 7 : Entretien et dépannage du glycomètre.....	52
Chapitre 8 : Informations techniques.....	63
Chapitre 9 : Garantie.....	68
Index	69

Introduction

Le présent manuel de l'utilisateur contient des avertissements, des précautions et des remarques :



AVERTISSEMENT

un **AVERTISSEMENT** indique un risque grave prévisible.



PRÉCAUTION

une **PRÉCAUTION** décrit une mesure que vous devez prendre pour utiliser le produit de manière sûre et efficace ou pour prévenir toute détérioration du produit.

REMARQUE

une **REMARQUE** est destinée à attirer votre attention sur d'importantes informations qui vous permettront une utilisation optimale du produit.

Le système Accu-Chek Guide

Utilisé avec les bandelettes-test Accu-Chek Guide, le glycomètre Accu-Chek Guide est destiné aux analyses quantitatives de glucose dans du sang total capillaire frais prélevé à l'extrémité du doigt, à la paume, à l'avant-bras ou au bras et permet ainsi de surveiller l'efficacité du contrôle de glycémie.

Utilisé avec les bandelettes-test Accu-Chek Guide, le glycomètre Accu-Chek Guide fournit un système d'analyse complet qui est destiné à l'autocontrôle diagnostique in vitro par une seule personne et ne devrait pas être partagé.

Ce système n'est pas destiné au diagnostic ou dépistage du diabète sucré, ni à l'analyse de glycémie à partir d'échantillons de sang néonatal du cordon.

Indiqué pour l'autocontrôle

Le système comprend : Glycomètre Accu-Chek Guide avec piles, bandelettes-test Accu-Chek Guide* et solutions de contrôle Accu-Chek Guide*.

*Certains de ces articles ne sont éventuellement pas inclus dans le kit. Ils peuvent être achetés séparément.

AVERTISSEMENT



Risque d'étouffement

Ce produit contient de petites pièces pouvant être avalées. Conservez les petites pièces hors de portée des enfants en bas âge et des personnes susceptibles d'avaler les petites pièces.

Risque de lésions mortelles

- Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Toute ingestion ou insertion dans le corps entraîne un risque de brûlures chimiques ou de perforation des tissus mous, voire un risque de mort. De graves brûlures peuvent survenir dans les 2 heures suivant une ingestion. En cas de suspicion d'ingestion ou d'insertion d'une pile dans une quelconque partie du corps, demandez immédiatement des soins médicaux.
- Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, interrompez toute utilisation du produit et conservez-le hors de portée des enfants. Contactez Accu-Chek Soins aux Patients au 1 800 363-7949.

AVERTISSEMENT

Risque d'infection

Tout objet en contact avec du sang humain constitue une source potentielle d'infection (voir : Clinical and Laboratory Standards Institute: Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline – Fourth Edition; CLSI document M29-A4, May 2014).

Risque de survenue d'un grave incident de santé

Tout non-respect des instructions d'analyse ou des instructions de conservation et de manipulation des bandelettes-test peut entraîner l'obtention de résultats incorrects et risque d'entraîner un traitement inapproprié. Veuillez lire attentivement et suivre les instructions figurant dans le manuel de l'utilisateur et les notices d'utilisation des bandelettes-test et solutions de contrôle.

AVERTISSEMENT

L'autopiqueur est destiné à l'usage unique et ne peut pas être partagé avec d'autres personnes.

Importance de la régularité des analyses de glycémie

La manière dont vous gérez votre diabète au quotidien peut être considérablement améliorée par des analyses de glycémie régulières. Nous avons fait en sorte que ces analyses s'effectuent le plus simplement possible.

Introduction

Informations importantes sur votre nouveau glycomètre


- Il est fortement recommandé de disposer d'une méthode d'analyse auxiliaire. Ne pas réaliser d'analyse peut retarder la prise de décisions thérapeutiques et entraîner de graves problèmes de santé. Les méthodes d'analyse auxiliaires peuvent par exemple reposer sur un glycomètre et des bandelettes-test auxiliaires. Demandez conseil à votre professionnel de la santé ou votre pharmacien pour connaître les autres méthodes auxiliaires possibles.
- Le glycomètre peut vous demander de choisir une langue ainsi qu'un format de l'heure (12 heures ou 24 heures) lorsque vous l'allumez pour la première fois.
- Vérifiez l'heure et la date affichées sur le glycomètre avant de procéder à une analyse. Ajustez l'heure et la date si nécessaire.
- Vos données seront différentes des affichages de données présentés tout au long du présent manuel à titre d'exemple.
- Contactez votre professionnel de la santé si vous avez suivi les étapes du manuel et que vous continuez d'avoir des symptômes qui ne semblent pas correspondre à vos résultats de glycémie ou si vous avez des questions.

Signalement d'incidents graves

Pour un patient/utilisateur/tiers au sein de l'Union Européenne et au sein de pays disposant d'un régime réglementaire identique; en cas de survenue d'un incident grave au cours de l'utilisation du présent dispositif ou suite à son utilisation, veuillez en informer le fabricant et votre autorité nationale.


1 Votre nouveau système

Le glycomètre Accu-Chek Guide

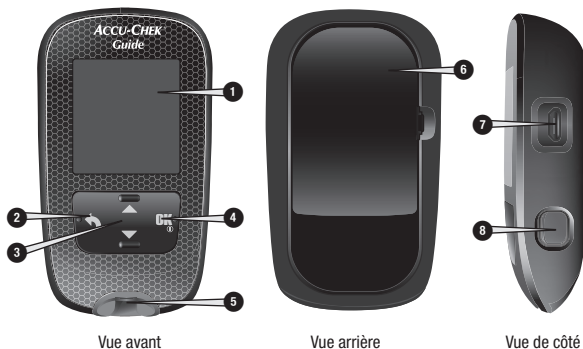

- 1. Écran**
Affiche les résultats, les messages et les résultats de glycémie en mémoire.
- 2. Touche Précédent**
Permet de revenir à l'affichage ou au champ précédent.
- 3. Touches Haut et Bas**
Appuyez pour naviguer parmi les options de menu ou pour augmenter ou diminuer des nombres.
- 4. Touche Marche/Arrêt/Réglage/OK**
Pour allumer ou éteindre le glycomètre et pour confirmer les options.
- 5. Fente d'insertion de la bandelette-test avec éclairage**
Insérez-y la bandelette-test.
- 6. Couverture du compartiment des piles**
Soulevez pour remplacer les piles.
- 7. Micro-port USB**
Permet de transférer les données du glycomètre vers un ordinateur (PC).
- 8. Éjecteur de bandelette-test**
Appuyez sur cette touche pour retirer la bandelette-test.

1 Votre nouveau système

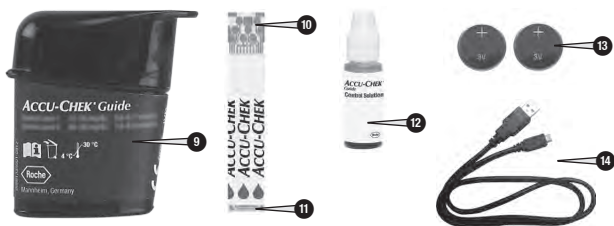

9. Contenant de bandelettes-test*
(exemple)

10. Bandelette-test* – Extrémité métallique
Insérez la bandelette-test dans le glycomètre par cette extrémité.

11. Bandelette-test* – Extrémité jaune
Appliquez ici la goutte de sang ou la solution de contrôle.

12. Flaçon de solution de contrôle*

13. Piles

14. Câble USB*





Connecte le glycomètre à un PC.

*Certains de ces articles ne sont éventuellement pas inclus dans le kit. Ils peuvent être achetés séparément.

1 Votre nouveau système


Fonctions des touches

Ce tableau présente les fonctions de la touche Précédent, des touches Haut et Bas et de la touche Marche/Arrêt/Réglage/OK sur le glycomètre. Ces fonctions sont utilisées dans l'ensemble du présent manuel. Reportez-vous au chapitre Réglages du glycomètre pour obtenir des instructions spécifiques sur la préparation du glycomètre.

Touche	Fonction
 Touche Précédent	Retourner à l'affichage précédent. Retourner au champ précédent.
 Touches Haut et Bas	Faire défiler un menu vers le haut et vers le bas. Augmenter ou diminuer un nombre.
 Touche Marche/ Arrêt/Réglage/OK	Appuyez brièvement sur la touche pour allumer le glycomètre. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour éteindre le glycomètre. Appuyez sur la touche pour sélectionner une option. Appuyez sur la touche pour accéder au champ ou à l'affichage suivant. Appuyez sur la touche pour enregistrer une option. Lorsque le glycomètre est éteint, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour vérifier l'écran du glycomètre. 

1 Votre nouveau système

Menus du glycomètre

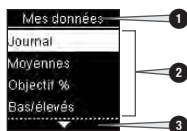











1. Titre de l'affichage ou du menu
2. Options du menu
3. Défilement de l'affichage vers le bas
4. Défilement de l'affichage vers le haut






Affichage	Description
	D'autres options de menu supplémentaires sont disponibles sous la dernière option. Appuyez sur la touche sur le glycomètre pour afficher les options.
	D'autres options de menu supplémentaires sont disponibles au-dessus de la première option. Appuyez sur la touche sur le glycomètre pour afficher les options.
	D'autres options de menu supplémentaires sont disponibles au-dessus et au-dessous des options. Appuyez sur la touche ou sur le glycomètre pour afficher les options.
	Option mise en surbrillance (Analyse) Appuyez sur la touche pour accéder au menu Analyse .
	Champ mis en surbrillance (HH = Heure) Appuyez sur la touche ou pour avancer ou reculer l'heure. Appuyez sur la touche pour confirmer le réglage de l'heure et passer au champ des minutes.

1 Votre nouveau système

Symboles

Voici une liste des symboles qui s'affichent à l'écran du glycomètre.

Symbole	Description
	Au-dessus de l'objectif de glycémie
	Après repas
	Au coucher
	Avant repas
	Au-dessous de l'objectif de glycémie
	Analyse de glycémie
	Coche / test de contrôle OK / option ou réglage sélectionné(e)
	Flacon de solution de contrôle
	Test de contrôle pas OK
	Modifier
	Erreur
	À jeun
	Mode avion
	Aide
	Pile faible
	Mes données
	Aucun marquage
	Autre

Symbole	Description
	Tous
	Réglages
	Rappel d'analyse
	Avertissement
	Dans l'objectif de glycémie

Réglage de la langue et du format de l'heure

Le glycomètre peut vous demander de choisir une langue ainsi qu'un format pour l'heure (12 heures ou 24 heures) lorsque vous l'allumez pour la première fois.

1



Allumez le glycomètre en appuyant brièvement sur la touche **OK**. **Language** (langue) s'affiche à l'écran.

2



Appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour mettre la langue en surbrillance. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer le réglage de la langue souhaitée et retourner au **Menu principal**.

1 Votre nouveau système

3

Format heure

✓ 12 heures

24 heures

Si le glycomètre vous demande de régler le format de l'heure :

Format heure

s'affiche à l'écran.

Appuyez sur la touche  ou  pour mettre en surbrillance **12 heures** (am/pm) ou **24 heures**.

Appuyez sur la touche  pour confirmer l'option et retourner au **Menu principal**.

REMARQUE


Contactez Accu-Chek Soins aux Patients au 1 800 363-7949 si vous avez sélectionné la mauvaise langue et que vous ne pouvez plus la corriger.

2 Analyses de glycémie

AVERTISSEMENT

Risque de survenue d'un grave incident de santé

L'utilisation de la mauvaise unité de mesure est susceptible de conduire à une interprétation erronée de votre niveau de glycémie réel et risque d'entraîner un traitement inapproprié. Les résultats de glycémie peuvent être affichés dans deux unités de mesure différentes : mg/dL ou mmol/L. L'étiquette située à l'arrière du glycomètre indique l'unité de mesure. Au Canada, l'unité de mesure des glycomètres est mmol/L. Si le glycomètre affiche la mauvaise unité, contactez Accu-Chek Soins aux Patients au 1 800 363-7949. Si vous ne savez pas quelle unité de mesure vous convient, contactez votre professionnel de la santé.

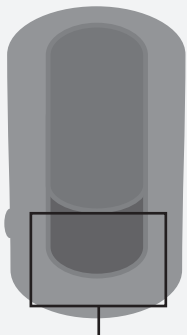

L'unité de mesure mg/dL ou mmol/L est indiquée ici

Utilisation du système Accu-Chek Guide

AVERTISSEMENT

Risque de survenue d'un grave incident de santé

- Le glycomètre et/ou la bandelette-test risquent d'être endommagés si vous avez laissé tomber le glycomètre seul ou avec une bandelette-test insérée. Éliminez la bandelette-test et réalisez un test de contrôle avec une solution de contrôle et une nouvelle bandelette-test non usagée afin de vous assurer que le glycomètre et les bandelettes-test fonctionnent correctement. Puis, recommencez l'analyse de glycémie avec une nouvelle bandelette-test.
- Une bandelette-test qui n'est pas conservée ou utilisée de manière appropriée est susceptible d'être à l'origine d'un résultat de glycémie incorrect.
- Ne conservez pas les bandelettes-test à des températures élevées ni dans des endroits humides (salle de bain ou cuisine)! La chaleur et l'humidité pourraient endommager les bandelettes-test.
- Utilisez uniquement des bandelettes-test Accu-Chek Guide.
- Utilisez la bandelette-test aussitôt après l'avoir retirée du contenant de bandelettes-test.
- N'appliquez pas de sang ou de solution de contrôle sur la bandelette-test avant de l'avoir insérée dans le glycomètre.
- Afin de protéger les bandelettes-test de l'humidité, refermez directement le contenant de bandelettes-test après avoir retiré une bandelette-test.

2 Analyses de glycémie

- Conservez les bandelettes-test non utilisées dans leur contenant d'origine fermé.
- Vérifiez la date de péremption sur le contenant de bandelettes-test. N'utilisez pas les bandelettes-test au-delà de cette date.
- Conservez le contenant de bandelettes-test et le glycomètre à l'abri de la chaleur et de l'humidité, par exemple dans une chambre.
- Reportez-vous à la notice d'utilisation des bandelettes-test pour obtenir des informations relatives aux conditions de stockage des bandelettes-test et aux conditions de fonctionnement du système.

Réalisation d'une analyse de glycémie à partir de sang prélevé à l'extrémité du doigt

REMARQUE

- Procédez au réglage correct du glycomètre avant de procéder à votre première analyse de glycémie.
- Vous aurez besoin du glycomètre, d'une bandelette-test et d'un autopiqueur équipé d'une lancette pour pouvoir effectuer une analyse de glycémie.
- Vous ne pouvez pas effectuer une analyse de glycémie tant que votre glycomètre est connecté à un PC à l'aide d'un câble USB.
- Vous pouvez commencer l'analyse de glycémie de 2 manières différentes.
 - Insérez une bandelette-test dans le glycomètre.
 - Allumez le glycomètre en appuyant brièvement sur la touche **OK**. Sélectionnez **Analyse** > **OK**.

1



Lavez-vous les mains à l'eau chaude savonneuse et essuyez-les soigneusement.

Préparez l'autopiqueur.

2



Vérifiez la date de péremption sur le contenant de bandelettes-test.

N'utilisez pas de bandelettes-test périmées.


3



Retirez une bandelette-test du contenant de bandelettes-test.

Puis refermez-le correctement.

4

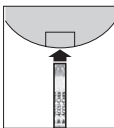

Insérez l'extrémité métallique de la bandelette-test dans le glycomètre.



Le glycomètre s'allume. **Préparation de l'analyse** s'affiche à l'écran.

2 Analyses de glycémie

5



Lorsque **Appliquer goutte** s'affiche à l'écran, piquez l'extrémité de votre doigt à l'aide de l'autopiqueur.

6



Massez doucement votre doigt de manière à activer le flux sanguin. Cela facilite l'obtention d'une goutte de sang.

7



Mettez l'**extrémité jaune** de la bandelette-test en contact avec la goutte de sang obtenue. Ne déposez pas de sang sur le dessus de la bandelette-test.

8



Retirez votre doigt de la bandelette-test lorsque **Analyse en cours** s'affiche à l'écran.

9



Le résultat de glycémie s'affiche à l'écran.

Vous avez la possibilité d'ajouter un marquage au résultat de glycémie en appuyant sur la touche **OK** OU de continuer à l'étape 12 pour terminer l'analyse.

10



Aj. marquage s'affiche à l'écran.

Appuyez sur la touche **OK** pour mettre en surbrillance un marquage. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer le marquage associé au résultat de glycémie. Reportez-vous au paragraphe Ajout de marquages à des résultats de glycémie du présent chapitre pour obtenir de plus amples détails.

11



Le résultat final s'affiche. Appuyez sur la touche **OK** ou **OK** pour confirmer le marquage et retourner au **Menu principal**. Si vous

souhaitez modifier le marquage, appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner le marquage.

Appuyez sur la touche **OK** pour retourner au menu **Aj. marquage**.

2 Analyses de glycémie

REMARQUE

Réalisation d'une **analyse de glycémie** : Si l'affichage **Résultat de contrôle** apparaît à l'écran, une erreur est survenue.

- Ne prenez aucune mesure sur la base du résultat de glycémie.
- Éliminez la bandelette-test et recommencez l'analyse de glycémie avec une nouvelle bandelette-test.

12

Retirez et éliminez la bandelette-test usagée en la tirant du glycomètre ou en appuyant sur l'éjecteur de bandelette-test situé sur le côté du glycomètre.



Appuyez sur cette touche pour retirer la bandelette-test.

Avertissements relatifs à la glycémie

Un avertissement s'affiche si votre résultat de glycémie dépasse l'intervalle d'analyse du glycomètre. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer le message d'avertissement LO (bas) ou HI (élevé), SINON le glycomètre passe automatiquement à l'affichage du résultat LO ou HI.

⚠ AVERTISSEM.
Résultat LO
Recommencer l'analyse de glycémie.
Contacter votre professionnel de la santé.

9:38am 12/11/15
LO
Ajouter marquage

La glycémie peut être au-dessous de l'intervalle d'analyse du système. Reportez-vous au paragraphe Résultats de glycémie inhabituels du présent chapitre.

⚠ AVERTISSEM.
Résultat HI
Vérifier la glycémie, les cétones et l'insuline.

9:38am 12/11/15
HI
Ajouter marquage

La glycémie peut être au-dessus de l'intervalle d'analyse du système. Reportez-vous au paragraphe Résultats de glycémie inhabituels du présent chapitre.

2 Analyses de glycémie

Ajout de marquages à des résultats de glycémie

REMARQUE

L'analyse de vos résultats de glycémie enregistrés dans votre glycomètre vous permet ainsi qu'à votre professionnel de la santé d'évaluer de manière efficace votre gestion du diabète. Cette analyse constitue un outil précieux pour améliorer votre gestion du diabète. Soyez vigilant(e) lors de l'ajout de marquages à vos résultats de glycémie. Des marquages incorrects peuvent générer la détection erronée de tendances par le glycomètre si la fonction Tendances est réglée sur **Activer**.







Vue d'ensemble

Il est très important de régler l'heure et la date correctes sur le glycomètre. Le réglage de l'heure et de la date correctes

permet une interprétation précise des informations pour vous et votre professionnel de la santé.

- Vous pouvez ajouter des marquages à vos résultats de glycémie afin de vous permettre et de permettre à votre professionnel de la santé d'analyser les tendances détectées par le glycomètre (reportez-vous au paragraphe Tendances du chapitre Réglages du glycomètre pour obtenir de plus amples détails).
- Si la fonction Tendances est réglée sur **Activer**, vous ne pouvez PAS modifier le marquage associé à un résultat de glycémie lorsqu'une tendance a été détectée (reportez-vous au paragraphe Tendances du chapitre Réglages du glycomètre pour obtenir de plus amples détails).
- L'ajout d'un marquage entraîne l'enregistrement de ce dernier ainsi que du symbole correspondant avec les résultats de glycémie.

Voici une liste des symboles de marquage qui peuvent être ajoutés à un résultat de glycémie.

Symbole	Nom	Description
	Avant repas	Si la fonction Tendances est réglée sur Activer , sélectionnez Avant déjeuner, Avant dîner, Avant souper ou Avant collation (voir la page suivante pour l'ajout de marquages avec la fonction Tendances réglée sur Activer).
	Après repas	Si la fonction Tendances est réglée sur Activer , sélectionnez Après déjeuner, Après dîner, Après souper ou Après collation (voir la page suivante pour l'ajout de marquages avec la fonction Tendances réglée sur Activer).
	À jeun	Sélectionnez À jeun en l'absence d'apport calorique pendant au moins 8 heures.*
	Au coucher	
	Autre	Vous pouvez utiliser ce marquage pour marquer un événement tel qu'un résultat de prélèvement sur site alternatif ou un exercice physique.
	Aucune saisie	1. Vous ne souhaitez pas ajouter de marquage. 2. Vous souhaitez retirer un marquage du résultat de glycémie actuel.

*American Diabetes Association: Standards of Medical Care in Diabetes-2020.

2 Analyses de glycémie

1



Ajouter marquage

Après avoir effectué une analyse de glycémie, le résultat de glycémie s'affiche à l'écran et **Ajouter marquage** est mis en surbrillance. Appuyez sur la touche **OK** pour ajouter un marquage.

2



Le menu **Aj. marquage** s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance le marquage souhaité (l'exemple ici est **Avant repas**). Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner le marquage.



Si la fonction Tendances est réglée sur Activer :
Si la fonction **Tendances** est réglée sur **Activer** et que vous sélectionnez **Avant repas** ou **Après repas**, appuyez sur la touche **▼** pour sélectionner un repas spécifique (**Déjeuner**, **Dîner**, **Souper** ou **Collation**). Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer le repas sélectionné associé au résultat de glycémie.

3



Avant déjeuner

Le résultat final s'affiche à l'écran accompagné du symbole du marquage. Appuyez sur la touche **OK** ou

↵ pour confirmer le marquage et retourner au **Menu principal**.
Pour modifier le marquage, appuyez sur la touche **▼** pour sélectionner le marquage.

Appuyez sur la touche **OK** pour retourner au menu **Aj. marquage**.

2 Analyses de glycémie

Réalisation d'une analyse de glycémie à partir de sang prélevé à la paume, à l'avant-bras ou au bras (prélèvement sur site alternatif, AST)



AVERTISSEMENT

Risque de survenue d'un grave incident de santé

Votre niveau de glycémie varie plus rapidement à l'extrémité du doigt qu'à la paume, à l'avant-bras et au bras. La réalisation d'une analyse de glycémie à partir de sang provenant de la paume, de l'avant-bras ou du bras est susceptible de donner lieu à une erreur d'interprétation de votre niveau de glycémie effectif et donc à un traitement inapproprié ainsi qu'aux effets potentiellement néfastes pour la santé.

- N'utilisez pas le prélèvement sur site alternatif (AST) pour étalonner un système de mesure de glucose en continu.
- N'utilisez pas le prélèvement sur site alternatif pour réaliser des calculs de la dose d'insuline.
- Un prélèvement sur site alternatif ne doit être réalisé qu'à un état d'équilibre (lorsque la glycémie n'évolue pas rapidement).

Vous avez la possibilité d'obtenir un échantillon de sang à partir d'autres sites sur votre corps en plus de l'extrémité du doigt. Les sites alternatifs comprennent la paume, l'avant-bras ou le bras.

Le sang prélevé à l'extrémité du doigt peut être utilisé à n'importe quel moment pour l'analyse de glycémie.

Si le sang est prélevé à la paume, à l'avant-bras ou au bras, il y a certains moments où il est déconseillé d'utiliser ce sang pour l'analyse de glycémie.

2 Analyses de glycémie

Pour toute analyse effectuée à partir de sang prélevé à la paume, à l'avant-bras ou au bras, veuillez préalablement lire le paragraphe suivant.

Vous pouvez effectuer une analyse de glycémie à partir de sang prélevé à la paume, à l'avant-bras ou au bras	<ul style="list-style-type: none">• juste avant un repas.• à jeun.
Vous ne pouvez PAS effectuer une analyse de glycémie à partir de sang prélevé à la paume, à l'avant-bras ou au bras	<ul style="list-style-type: none">• jusqu'à 2 heures après un repas, quand les valeurs de glycémie peuvent monter rapidement.• après une injection d'insuline de bolus, quand les valeurs de glycémie peuvent diminuer rapidement.• après un exercice.• en cas de maladie.• si vous suspectez une valeur de glycémie basse (hypoglycémie).• s'il vous arrive parfois de ne pas ressentir les hypoglycémies.

Si les prélèvements sur site alternatif vous intéressent, parlez-en tout d'abord à votre professionnel de la santé.

Si vous avez besoin d'un embout AST et souhaitez obtenir des informations détaillées à propos des prélèvements sur site alternatif, contactez Accu-Chek Soins aux Patients au 1 800 363-7949.

2 Analyses de glycémie

Résultats de glycémie inhabituels



PRÉCAUTION

Risque de survenue d'un grave incident de santé

Si les résultats de glycémie obtenus ne correspondent pas à votre état de santé, reportez-vous à la liste suivante pour résoudre le problème.

Origine possible	Résolution du problème
Vous êtes-vous lavé les mains?	Lavez-vous les mains à l'eau chaude savonneuse et essuyez-les soigneusement. Recommencez l'analyse de glycémie avec une nouvelle bandelette-test.
La date de péremption des bandelettes-test était-elle dépassée?	Éliminez les bandelettes-test si elles ont dépassé la date de péremption. Recommencez l'analyse de glycémie avec une bandelette-test dont la date de péremption n'est pas dépassée.
Avez-vous toujours refermé correctement le contenant de bandelettes-test?	Remplacez les bandelettes-test si vous pensez que le contenant de bandelettes-test est resté ouvert pendant un certain temps. Recommencez l'analyse de glycémie.
Avez-vous utilisé la bandelette-test aussitôt après l'avoir retirée du contenant de bandelettes-test?	Recommencez l'analyse de glycémie avec une nouvelle bandelette-test.
Avez-vous bien conservé les bandelettes-test à l'abri de la chaleur et de l'humidité?	Recommencez l'analyse de glycémie avec une bandelette-test conservée dans des conditions adéquates.
Avez-vous bien suivi les instructions?	Reportez-vous au chapitre Analyses de glycémie et recommencez l'analyse de glycémie. Si le problème persiste, contactez Accu-Chek Soins aux Patients au 1 800 363-7949.
Le glycomètre et les bandelettes-test fonctionnent-ils correctement?	Effectuez un test de contrôle. Reportez-vous au chapitre Tests de contrôle pour obtenir des instructions.
Avez-vous toujours un doute sur l'origine du problème?	Contactez Accu-Chek Soins aux Patients au 1 800 363-7949.

2 Analyses de glycémie

Symptômes d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie



AVERTISSEMENT

Risque d'hypoglycémie

En reconnaissant les symptômes de l'hypoglycémie ou de l'hyperglycémie, vous êtes en mesure d'interpréter les résultats de glycémie et de décider de l'attitude à avoir s'ils semblent inhabituels.

- Effectuez une analyse de glycémie à partir de sang prélevé à l'extrémité du doigt si vous présentez l'un des symptômes suivants ou d'autres symptômes inhabituels.
- Contactez votre professionnel de la santé dans les plus brefs délais si le résultat de glycémie est signalé comme étant bas (LO) ou élevé (HI).

Glycémie basse (hypoglycémie) : les symptômes d'hypoglycémie peuvent notamment consister en : anxiété, tremblements, transpiration, maux de tête, augmentation de l'appétit, sensation de vertige, pâleur cutanée, modifications soudaines de l'humeur ou irritabilité, fatigue, difficultés à se concentrer, maladresse, palpitations et/ou état confusionnel.

Glycémie élevée (hyperglycémie) : les symptômes d'hyperglycémie peuvent notamment consister en : augmentation de la soif, envie fréquente d'uriner, vision trouble, somnolence et/ou perte de poids inexplicable.

Effets et prévalence de la maladie

Pour obtenir de plus amples informations sur les effets et la prévalence du diabète dans votre région, consultez le site web de la Fédération internationale du diabète sur www.idf.org ou envoyez un e-mail à info@idf.org. Pour obtenir des conseils ou connaître le numéro de la ligne d'assistance, consultez l'organisation nationale du diabète de votre pays.

3 Tests de contrôle

À quel moment faut-il effectuer un test de contrôle?

Le test de contrôle sert à vérifier que le glycomètre et les bandelettes-test fonctionnent correctement. Effectuez un test de contrôle dans les cas suivants :

- Vous ouvrez une boîte de bandelettes-test neuve.
- Vous avez laissé le contenant de bandelettes-test ouvert.
- Vous pensez que les bandelettes-test sont endommagées.
- Vous souhaitez vérifier le fonctionnement du glycomètre et des bandelettes-test.
- Vos bandelettes-test ont été exposées à des températures excessives, à l'humidité ou aux deux.
- Vous avez laissé tomber le glycomètre.
- Votre résultat de glycémie ne correspond pas à votre état de santé.
- Vous désirez vous assurer que vous effectuez l'analyse de glycémie correctement.

À propos des solutions de contrôle

- Utilisez uniquement des solutions de contrôle Accu-Chek Guide.
- Refermez correctement le flacon de solution de contrôle après utilisation.
- Lorsque vous ouvrez un nouveau flacon de solution de contrôle, inscrivez la date sur l'étiquette du flacon. La solution de contrôle doit être éliminée au plus tard 3 mois après la date à laquelle le flacon de solution de contrôle a été ouvert (date d'élimination) sans toutefois dépasser la date de péremption imprimée sur l'étiquette du flacon.
- N'utilisez pas de solution de contrôle périmée ou dont la date d'élimination est dépassée.

- Pour connaître les conditions de stockage de la solution de contrôle, reportez-vous à la notice d'utilisation qui l'accompagne.
- Le glycomètre fait automatiquement la différence entre la solution de contrôle et le sang.
- Les résultats de contrôle enregistrés ne peuvent pas être consultés à partir du glycomètre.
- La solution de contrôle peut tacher les vêtements. Si vous en renversez, lavez vos vêtements à l'eau et au savon.

Réalisation d'un test de contrôle

Vous aurez besoin du glycomètre, d'une bandelette-test et de la solution de contrôle de niveau 1 (Control 1) ou de niveau 2 (Control 2).

1




Vérifiez la date de péremption sur le contenant de bandelettes-test. N'utilisez pas de bandelettes-test périmées.

2



Retirez une bandelette-test du contenant de bandelettes-test. Puis refermez-le correctement.

3

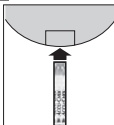

Insérez l'extrémité métallique de la bandelette-test dans le glycomètre. Placez le glycomètre à plat.

3 Tests de contrôle

Analyse



Préparation de l'analyse

Le glycomètre s'allume. **Préparation de l'analyse** s'affiche à l'écran.

Analyse



Appliquer goutte

Appliquer goutte s'affiche à l'écran.

4



Choisissez la solution de contrôle à utiliser pour le test de contrôle. Le niveau devra être saisi ultérieurement au cours du test de contrôle.

5



Enlevez le bouchon du flacon de solution de contrôle. Essayez l'embout du flacon avec un mouchoir en papier. Pressez le flacon doucement pour former une petite goutte sur l'embout.

6



Mettez la goutte en contact avec l'**extrémité jaune** de la bandelette-test. Ne déposez pas de solution de contrôle sur le dessus de la bandelette-test.

Analyse

Retirer le doigt



Analyse en cours

Analyse en cours s'affiche à l'écran lorsque la bandelette-test a aspiré suffisamment de solution de contrôle.

7

Rés. contrôle

9:38am 12/11/16

2.8 mmol/L

Choisir niveau

1

Rés. contrôle et le symbole du flacon de solution de contrôle s'affichent à l'écran. Appuyez sur la touche ou

pour sélectionner le niveau de contrôle que vous avez utilisé pour le test de contrôle. Si vous ne sélectionnez pas de niveau, le glycomètre enregistre le résultat de contrôle sans niveau de contrôle. Appuyez sur la touche **OK**.

REMARQUE

Réalisation d'un **test de contrôle** : Si l'affichage **Résultat de contrôle N'APPARAÎT PAS**, une erreur est survenue.


- Ne prenez aucune mesure sur la base du résultat de contrôle.
- Éliminez la bandelette-test et recommencez le test de contrôle avec une nouvelle bandelette-test.

3 Tests de contrôle

8



Dans objectif et le symbole ✓ s'affichent à l'écran si le résultat de contrôle se situe dans l'intervalle.

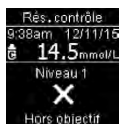

Hors objectif et le symbole ✗ s'affichent à l'écran si le résultat de contrôle se situe hors de l'intervalle.

9



Essuyez l'embout du flacon avec un mouchoir en papier. Refermez correctement le flacon.

Retirez et éliminez la bandelette-test usagée.

REMARQUE

Le glycomètre s'éteint 90 secondes après la réalisation correcte d'un test ou 15 secondes après avoir retiré la bandelette-test si aucune autre action n'a lieu.

Interprétation des résultats de contrôle hors de l'intervalle acceptable

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de survenue d'un grave incident de santé

Des résultats de glycémie incorrects peuvent conduire à des recommandations thérapeutiques erronées.

Les intervalles de concentration sont imprimés sur l'étiquette du contenant de bandelettes-test. Si le résultat de contrôle se situe hors de l'intervalle, assurez-vous que le glycomètre et les bandelettes-test fonctionnent correctement. Reportez-vous à la liste suivante pour résoudre le problème.

3 Tests de contrôle

Origine possible	Résolution du problème
La date de péremption des bandelettes-test ou des solutions de contrôle était-elle dépassée?	Éliminez les bandelettes-test ou le flacon de solution de contrôle s'ils ont dépassé la date de péremption. De même, éliminez la solution de contrôle si l'ouverture du flacon remonte à plus de 3 mois. Recommencez le test de contrôle avec une bandelette-test et une goutte de solution de contrôle dont la date de péremption n'est pas dépassée.
Avez-vous bien essuyé l'embout du flacon de solution de contrôle avant l'utilisation?	Essayez l'embout du flacon avec un mouchoir en papier. Recommencez le test de contrôle avec une nouvelle bandelette-test et une nouvelle goutte de solution de contrôle.
Avez-vous toujours refermé correctement le contenant de bandelettes-test et le flacon de solution de contrôle?	Remplacez les bandelettes-test ou la solution de contrôle si vous pensez que le contenant ou le flacon sont restés ouverts pendant un certain temps. Recommencez le test de contrôle.
Avez-vous utilisé la bandelette-test aussitôt après l'avoir retirée du contenant de bandelettes-test?	Recommencez le test de contrôle avec une nouvelle bandelette-test et une nouvelle goutte de solution de contrôle.
Avez-vous bien conservé les bandelettes-test et les solutions de contrôle à l'abri de la chaleur et de l'humidité?	Recommencez le test de contrôle avec une bandelette-test et une solution de contrôle conservées dans des conditions adéquates.
Avez-vous bien suivi les instructions?	Reportez-vous au chapitre Tests de contrôle et recommencez le test de contrôle.
Avez-vous choisi le bon niveau de solution de contrôle, niveau 1 ou 2, lorsque vous avez effectué le test de contrôle?	Même si vous vous êtes trompé(e) de niveau de solution de contrôle, vous pouvez comparer le résultat de contrôle à l'intervalle imprimé sur le contenant de bandelettes-test.
Avez-vous toujours un doute sur l'origine du problème?	Contactez Accu-Chek Soins aux Patients au 1 800 363-7949.

4 Réglages du glycomètre

Vue d'ensemble

Vous pouvez ajuster les réglages suivants dans le glycomètre en fonction de vos préférences personnelles. Reportez-vous aux paragraphes du présent chapitre pour obtenir de plus amples détails sur le réglage des options.


Réglage	Options	Fonction
Heure/date	Heure / date	Réglez l'heure et la date.
Signal sonore	Activer / Désactiver	Sélectionnez Activer ou Désactiver.
Sans fil	Sélectionnez les réglages de communication sans fil. Reportez-vous au chapitre Communication sans fil et liaison du glycomètre.	
Objectifs de glyc. (Objectifs de glycémie)	Désactiver / Obj. unique (Objectif unique) / 2 objectifs	<p>Définissez l'objectif de glycémie qui vous convient.</p> <p>REMARQUE</p> <p>Votre professionnel de la santé vous communiquera l'objectif de glycémie adapté à votre cas.</p> <p>Désactiver – aucune flèche correspondant à l'objectif de glycémie n'est affichée avec le résultat de glycémie. La fonction Tendances est réglée sur Désactiver (reportez-vous au paragraphe Tendances du présent chapitre pour obtenir de plus amples détails).</p>
	3,9–10,0 mmol/L (objectif de glycémie pré-réglé)	Obj. unique – les résultats de glycémie sont accompagnés d'un marquage indiquant la position du résultat par rapport à l'objectif de glycémie unique défini dans le glycomètre (Dessus objectif, Dans objectif, Dessous objectif).
	Objectif de glycémie Avant repas 3,9–6,1 mmol/L (objectif de glycémie pré-réglé) Objectif de glycémie Après repas 3,9–10,0 mmol/L (objectif de glycémie pré-réglé)	2 objectifs – objectifs de glycémie Avant repas et Après repas réglés. Les résultats de glycémie sont accompagnés d'un marquage Dessus objectif, Dans objectif ou Dessous objectif indiquant la position du résultat par rapport aux 2 objectifs de glycémie définis dans le glycomètre (Avant repas et Après repas).
Tendances	Activer / Désactiver	Activer – une tendance est détectée lorsque 2 résultats de glycémie inférieurs à l'objectif de glycémie ou 3 résultats de glycémie supérieurs à l'objectif de glycémie associés au même marquage sont détectés au cours d'une période de 7 jours.

4 Réglages du glycomètre

Réglage	Options	Fonction
Rappels	Activer / Désactiver / Modifier heure	Activer – réglez jusqu'à 4 rappels d'analyse par jour afin de vous rappeler d'effectuer une analyse.
Après repas	Activer / Désactiver / Modifier heure	Activer – vous rappelle d'effectuer une analyse de glycémie après le repas.
Dernier résultat	Activer / Désactiver	Définissez si vous souhaitez que le résultat de glycémie précédent (des dernières 24 heures) s'affiche avec le résultat de glycémie actuel. Activer – le résultat de glycémie précédent s'affiche avec le résultat de glycémie actuel. Désactiver – seul le résultat de glycémie actuel s'affiche.
Langue		Sélectionnez la langue du glycomètre.
Format d'heure	12 heures / 24 heures	Sélectionnez le format d'heure du glycomètre.

Heure/date

1

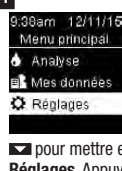

9:30am 12/11/15
Menu principal
Analyse
Mes données
Réglages

▼ pour mettre en surbrillance **Réglages**. Appuyez sur la touche **OK**.

Allumez le glycomètre en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche ▼ pour mettre en surbrillance **Réglages**. Appuyez sur la touche **OK**.

2



Réglages
Heure/date
Signal sonore
Sans fil
Plus d'options

Heure/date est mis en surbrillance. Appuyez sur la touche **OK**.

3



Heure/date
HH MM A/P
9:38 am
JJ MM AA
12/11/15

Appuyez sur la touche ▼ ou ▲ pour ajuster chaque champ. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer le réglage et passer au champ suivant. Réglez **am** ou **pm** si nécessaire.

Appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer et retourner au menu précédent.

Signal sonore

Le signal sonore prévient l'utilisateur :

- quand une bandelette-test est insérée.
- d'appliquer le sang ou la solution de contrôle sur la bandelette-test.
- quand une quantité suffisante de sang ou de solution de contrôle a été aspirée par la bandelette-test.
- quand l'analyse de glycémie ou le test de contrôle a été effectué.
- quand le glycomètre est allumé.

4 Réglages du glycomètre

- quand une touche a été enfoncée.
- qu'il est l'heure d'effectuer une analyse (si la fonction Rappels ou les rappels Après repas sont réglés sur **Activer**).
- quand les piles sont insérées.
- qu'il n'existe aucun résultat de glycémie enregistré ou qu'il existe une saisie non valide dans le journal.
- qu'il n'existe aucune erreur dans le journal d'erreurs.
- en cas d'erreur (même désactivé, le signal sonore retentit pour signaler une erreur).

1

9:30am 12/11/15
Menu principal
Analyse
Mes données
Réglages

Allumez le glycomètre en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Réglages**. Appuyez sur la touche **OK**.

2

Réglages
Heure/date
Signal sonore
Sans fil
Plus d'options

Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Signal sonore**. Appuyez sur la touche **OK**.

3

Signal sonore
✓ Activer
Désactiver

Appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Activer** ou **Désactiver**. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le symbole ✓ devant cette option.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer l'option et retourner au menu précédent.

Objectifs de glycémie

Votre professionnel de la santé peut vous indiquer l'intervalle de glycémie qui vous convient. Il est très important de respecter les limites de votre objectif de glycémie.




L'objectif de glycémie peut être défini entre 3,3–5,5 mmol/L (limite inférieure) et 5,6–16,6 mmol/L (limite supérieure).

Options	Fonction
Désactiver	Les flèches indiquant au-dessus de l'objectif de glycémie, dans l'objectif de glycémie ou au-dessous de l'objectif de glycémie ne sont pas affichées avec les résultats de glycémie.
Obj. unique (Objectif unique)	Réglez la limite inférieure et supérieure de l'objectif de glycémie. Le glycomètre vous demande d'activer la fonction Tendances si souhaité (reportez-vous au paragraphe Tendances du présent chapitre pour obtenir de plus amples détails).

4 Réglages du glycomètre

2 objectifs	<p>Réglez les limites inférieure et supérieure des objectifs de glycémie Avant repas et Après repas.</p> <p>Vous devez marquer vos résultats de glycémie à l'aide d'un marquage afin de permettre au glycomètre de détecter les résultats de glycémie Avant repas ou Après repas qui sont au-dessus de l'objectif de glycémie, dans l'objectif de glycémie ou au-dessous de l'objectif de glycémie (reportez-vous au paragraphe Ajout de marquages à des résultats de glycémie du chapitre Analyses de glycémie pour obtenir de plus amples détails).</p> <p>Le glycomètre vous demande d'activer la fonction Tendances si souhaité (reportez-vous au paragraphe Tendances du présent chapitre pour obtenir de plus amples détails).</p>
-------------	--


Les symboles suivants s'affichent avec les résultats de glycémie lorsque la fonction Objectifs de glycémie est activée.

Symbole	Signification
	Le résultat de glycémie est au-dessous de l'objectif de glycémie.
	Le résultat de glycémie est dans l'objectif de glycémie.
	Le résultat de glycémie est au-dessus de l'objectif de glycémie.


AVERTISSEMENT

Cette fonction ne remplace pas la formation sur l'hypoglycémie donnée par votre professionnel de la santé.

1

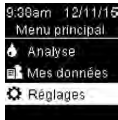

9:30am 12/11/15
Menu principal
Analyse
Mes données
Réglages

Allumez le glycomètre en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche  pour mettre en surbrillance **Réglages**. Appuyez sur la touche **OK**.

2



Réglages
Heure/date
Signal sonore
Sans fil
Plus d'options

Appuyez sur la touche  pour mettre en surbrillance **Plus d'options**. Appuyez sur la touche **OK**.


3





Plus d'options
Objectifs de glyc.
Tendances
Rappels
Après repas

L'option **Objectifs de glyc.** est mise en surbrillance. Appuyez sur la touche **OK**.

4



Objectifs gly.
Désactiver
Obj. unique
2 objectifs
Aide

Appuyez sur la touche  ou  pour mettre en surbrillance **Désactiver**, **Obj. unique** ou **2 objectifs**. Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner une option (l'exemple ici est **2 objectifs**).

4 Réglages du glycomètre

5



Appuyez sur la touche ou pour régler la limite inférieure de l'objectif de glycémie **Avant repas**. Appuyez sur la touche pour confirmer le réglage et passer au champ suivant.


Réglez ensuite la limite supérieure de l'objectif de glycémie **Avant repas** ainsi que les limites inférieure et supérieure de l'objectif de glycémie **Après repas**. Appuyez sur la touche .

6



La s'affiche devant l'option sélectionnée.

Appuyez sur la touche pour retourner au menu précédent.

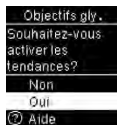

Le glycomètre peut vous demander d'activer la fonction Tendances.

Appuyez sur la touche ou pour mettre en surbrillance **Oui** ou **Non**.

Appuyez sur la touche pour confirmer l'option et retourner au menu précédent (reportez-vous au paragraphe Tendances du présent chapitre pour obtenir de plus amples détails).

REMARQUE

L'analyse de vos résultats de glycémie enregistrés dans votre glycomètre vous permet ainsi qu'à votre professionnel de la santé d'évaluer de manière efficace votre gestion du diabète. Cette analyse constitue un outil précieux pour améliorer votre gestion du diabète. Soyez vigilant(e) lors de l'ajout de marquages à vos résultats de glycémie. Des marquages incorrects peuvent générer la détection erronée de tendances par le glycomètre si la fonction Tendances est réglée sur **Activer**.

Tendances


Une tendance est détectée par le glycomètre lorsque 2 résultats de glycémie inférieurs à l'objectif de glycémie (Tendance basse) ou 3 résultats de glycémie supérieurs à l'objectif de glycémie (Tendance élevée) associés au même marquage sont détectés au cours d'une période de 7 jours.

- Le glycomètre ne détecte PAS de tendance pour le marquage « autre » ajouté aux résultats de glycémie.
- Il est très important de régler l'heure et la date correctes sur le glycomètre. Le réglage de l'heure et de la date correctes permet une interprétation précise des informations pour vous et votre professionnel de la santé.
- Seuls les résultats de glycémie marqués à l'aide de marquages sont pris en compte par la fonction Tendances. Si les résultats de glycémie LO ou HI sont marqués à l'aide de marquages, les résultats de glycémie sont pris en compte dans les tendances (reportez-vous au chapitre Analyses de glycémie pour obtenir de plus amples détails).



4 Réglages du glycomètre

- Les objectifs de glycémie doivent être réglés dans le glycomètre pour pouvoir utiliser la fonction Tendances. En l'absence de réglage des objectifs de glycémie, le glycomètre vous demande de régler ces derniers.

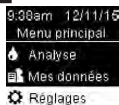1





9:38am 12/11/15
Menu principal
Analyse
Mes données
Réglages

Appuyez sur la touche  pour mettre en surbrillance **Réglages**. Appuyez sur la touche .

2



Réglages
Heure/date
Signal sonore
Sans fil
Plus d'options

Appuyez sur la touche  pour mettre en surbrillance **Plus d'options**. Appuyez sur la touche .

3







Plus d'options
Objectifs de glyc.
Tendances
Rappels
Après repas


Appuyez sur la touche  pour mettre en surbrillance **Tendances**. Appuyez sur la touche .

4



Tendances
Désactiver
Activer
Aide


Appuyez sur la touche  pour mettre en surbrillance **Activer**. Appuyez sur la touche  pour afficher le symbole  devant cette option. Appuyez sur la touche .

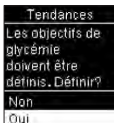


Tendances
Les objectifs de glycémie doivent être définis. Définir?
Non
Oui

Ce message s'affiche à l'écran si les objectifs de glycémie sont réglés sur Désactiver :

Appuyez sur la touche  pour mettre en surbrillance **Oui**. Appuyez sur la touche .

(Pour régler la fonction Tendances sur **Désactiver**, sélectionnez **Non**. Appuyez sur la touche  pour retourner au menu **Tendances**.)

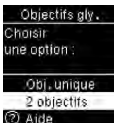

Objectifs gly.
Choisir une option :
Obj. unique
2 objectifs
Aide

Objectifs gly. s'affiche à l'écran (reportez-vous au paragraphe Objectifs de glycémie du présent chapitre pour obtenir de plus amples détails à propos du réglage des objectifs de glycémie).

Si la fonction Tendances est réglée sur **Activer** et qu'une nouvelle tendance est détectée avec un résultat de glycémie, un message s'affiche à l'écran.




Tend. basse
Nouvelle tendance détectée.
Voir plus tard
Détails


Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Détails** afin d'afficher les résultats de glycémie qui composent cette tendance.

ou




Tend. basse
Nouvelle tendance détectée.
Voir plus tard
Détails

Appuyez sur la touche  pour mettre en surbrillance **Voir plus tard**.

Appuyez sur la touche  pour retourner à l'affichage précédent.

4 Réglages du glycomètre

Rappels d'analyse

Vous pouvez créer jusqu'à 4 rappels d'analyse généraux par jour afin de vous rappeler d'effectuer une analyse. Une série de signaux sonores retentit et le symbole  est affiché pour indiquer l'échéance d'un rappel d'analyse défini dans le glycomètre.

Les rappels d'analyse :

- cessent d'émettre des signaux sonores dès qu'une bandelette-test est insérée ou que vous appuyez brièvement sur n'importe quelle touche.
- sont reportés au prochain rappel d'analyse si une analyse a été effectuée dans les 15 minutes précédant un rappel d'analyse.
- n'apparaissent pas/n'entraînent pas l'émission de signaux sonores si le glycomètre est en marche au moment du rappel d'analyse (y compris si le glycomètre est connecté à un câble USB).
- n'apparaissent pas/n'entraînent pas l'émission de signaux sonores si le glycomètre est connecté et communique avec un dispositif qui est certifié Continua Certified®.
- n'entraînent pas l'émission de signaux sonores si la fonction Signal sonore du glycomètre a été désactivée.
- n'apparaissent pas/n'entraînent pas l'émission de signaux sonores si les piles doivent être remplacées.

Réglage de rappels d'analyse


- Les heures de rappel pré-réglées dans le glycomètre sont les suivantes : 8h00 a.m., 12h00 p.m. (midi), 6h00 p.m. et 10h00 p.m. Suivez les instructions ci-dessous pour modifier les heures de rappel.

- Si un rappel d'analyse général a été réglé à la même heure qu'un rappel d'analyse Après repas, ce dernier apparaît/émet des signaux sonores à la place du rappel d'analyse général (reportez-vous au paragraphe Rappels d'analyse Après repas du présent chapitre pour obtenir de plus amples détails).

1



0:38am 12/11/15
Menu principal
Analyse
Mes données
Réglages

Allumez le glycomètre en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche  pour mettre en surbrillance **Réglages**. Appuyez sur la touche **OK**.

2



Réglages
Heure/date
Signal sonore
Sans fil
Plus d'options

Appuyez sur la touche  pour mettre en surbrillance **Plus d'options**. Appuyez sur la touche **OK**.


3




Plus d'options
Objectifs de glyc.
Tendances
Rappels
Après repas

Appuyez sur la touche  ou  pour mettre en surbrillance **Rappels**. Appuyez sur la touche **OK**.

4



Rappels
8:00am
12:00pm
6:00pm
10:00pm

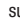

Les heures de rappel pré-réglées s'affichent à l'écran. Appuyez sur la touche  pour mettre en surbrillance une heure de rappel. Appuyez sur la touche **OK**.

4 Réglages du glycomètre

5




L'heure de rappel préréglée s'affiche. Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner **Activer** ou

Désactiver. Appuyez sur la touche  pour afficher le symbole  devant cette option.







Pour modifier l'heure du rappel affichée :

Appuyez sur la touche  pour mettre en

surbrillance **Modifier heure**. Appuyez sur la touche .




Appuyez sur la touche  ou  pour ajuster chaque champ. Appuyez sur la touche  pour


passer au champ suivant. Appuyez sur la touche  pour retourner au menu précédent.

6



Une  indique que le rappel d'analyse a été défini pour l'heure affichée et automatiquement réglé sur **Activer**.

Pour désactiver le rappel d'analyse, appuyez sur la touche  pour mettre en surbrillance **Désactiver**.


Appuyez sur la touche  pour retourner au menu **Rappels**.

7




L'heure du rappel s'affiche à l'écran.

Appuyez sur la touche  pour continuer à régler des rappels d'analyse

supplémentaires ou sur la touche  pour retourner au menu **Plus d'options**.

Rappels d'analyse Après repas

Les rappels d'analyse Après repas peuvent être réglés pour vous rappeler de procéder ultérieurement à une nouvelle analyse de glycémie lorsque vous ajoutez un marquage Avant repas à un résultat de glycémie. Lors de l'émission d'un rappel d'analyse, une série de signaux sonores retentit et le symbole  est affiché.

Les rappels d'analyse Après repas :

- cessent d'émettre des signaux sonores dès qu'une bandelette-test est insérée ou que vous appuyez brièvement sur n'importe quelle touche.
- sont reportés au prochain rappel d'analyse si une analyse a été effectuée dans les 15 minutes précédant un rappel d'analyse.
- n'apparaissent pas/n'entraînent pas l'émission de signaux sonores si le glycomètre est en marche au moment du rappel d'analyse (y compris si le glycomètre est connecté à un câble USB).
- n'apparaissent pas/n'entraînent pas l'émission de signaux sonores si le glycomètre est connecté et communique avec un dispositif qui est certifié Continua Certified®.

4 Réglages du glycomètre

- n'entraînent pas l'émission de signaux sonores si la fonction Signal sonore du glycomètre a été désactivée.
- n'apparaissent pas/n'entraînent pas l'émission de signaux sonores si les piles doivent être remplacées.

Réglage des rappels d'analyse Après repas

- L'ajout d'un marquage Avant repas à un résultat de glycémie entraîne le réglage d'un rappel d'analyse Après repas dans le glycomètre.
- L'ajout d'un marquage Après repas à des résultats de glycémie permet d'obtenir de plus amples informations à propos de vos résultats de glycémie, ce qui vous aide et aide votre professionnel de la santé à mieux gérer votre diabète.
- Consultez votre professionnel de la santé pour déterminer l'heure de l'analyse Après repas.
- Réglez l'échéance de rappels d'analyse Après repas sur 1 heure, 1 heure 30 min ou 2 heures.

1

9:30am 12/11/15
Menu principal
Analyse
Mes données
Réglages

Allumez le glycomètre en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Réglages**. Appuyez sur la touche **OK**.

2

Réglages
Heure/date
Signal sonore
Sans fil
Plus d'options

Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Plus d'options**. Appuyez sur la touche **OK**.

3

Plus d'options
Objectifs de glyc.
Tendances
Rappels
Après repas

Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Après repas**. Appuyez sur la touche **OK**.

4

Après repas
✓ Activer
Désactiver
Modifier heure
Aide

Appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Activer**. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le symbole **✓** devant cette option.

5

Après repas
✓ Activer
Désactiver
Modifier heure
Aide

Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Modifier heure**. Appuyez sur la touche **OK**.

6

Après repas
Rappeler après :
1 heure
✓ 1 heure 30 min
2 heures

Appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour mettre en surbrillance **1 heure**, **1 heure 30 min** ou **2 heures**, ce qui correspond à la durée écoulée après un repas avant qu'un rappel d'analyse **Après repas** ne soit émis.


Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le symbole **✓** devant cette option.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer le réglage et retourner au menu précédent.

4 Réglages du glycomètre

Dernier résultat

Définissez si vous souhaitez que le résultat de glycémie précédent s'affiche avec le résultat de glycémie actuel. **Les résultats de glycémie remontant à plus de 24 heures ne sont pas affichés.**

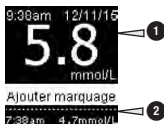

Désactiver – seul le résultat de glycémie actuel ❶ s'affiche.

Activer – le résultat de glycémie précédent ❷ s'affiche avec le résultat de glycémie actuel.

1

9:30am 12/11/15
Menu principal
Analyse
Mes données
Réglages

Allumez le glycomètre en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche **OK** pour mettre en surbrillance **Réglages**. Appuyez sur la touche **OK**.

2

Réglages
Heure/date
Signal sonore
Sans fil
Plus d'options

Appuyez sur la touche **OK** pour mettre en surbrillance **Plus d'options**. Appuyez sur la touche **OK**.

3

Plus d'options
Tendances
Rappels
Après repas
Dernier résultat

Appuyez sur la touche **OK** pour mettre en surbrillance **Dernier résultat**. Appuyez sur la touche **OK**.

4

Dernier résult.
✓ Activer
Désactiver
Alde

Appuyez sur la touche **OK** ou **OK** pour mettre en surbrillance **Activer** ou **Désactiver**. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le symbole **✓** devant cette option.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer l'option et retourner au menu précédent.

Langue

Sélectionnez la langue du glycomètre.

1

9:30am 12/11/15
Menu principal
Analyse
Mes données
Réglages

Allumez le glycomètre en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche **OK** pour mettre en surbrillance **Réglages**. Appuyez sur la touche **OK**.

2

Réglages
Heure/date
Signal sonore
Sans fil
Plus d'options

Appuyez sur la touche **OK** pour mettre en surbrillance **Plus d'options**. Appuyez sur la touche **OK**.

3

Plus d'options
Rappels
Après repas
Dernier résultat
Langue

Appuyez sur la touche **OK** pour mettre en surbrillance **Langue**. Appuyez sur la touche **OK**.

4 Réglages du glycomètre

4



Appuyez sur la touche  ou  pour mettre en surbrillance la langue souhaitée. Appuyez sur la touche  pour afficher le symbole  devant cette option.

Appuyez sur la touche  pour confirmer la langue et retourner au menu précédent.

Format d'heure

Sélectionnez le format d'heure (12 heures ou 24 heures) du glycomètre.

1



Allumez le glycomètre en appuyant brièvement sur la touche . À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche  pour mettre en surbrillance **Réglages**. Appuyez sur la touche .

2




Appuyez sur la touche  pour mettre en surbrillance **Plus d'options**. Appuyez sur la touche .





3




Appuyez sur la touche  pour mettre en surbrillance **Format d'heure**. Appuyez sur la touche .

4



Appuyez sur la touche  ou  pour mettre en surbrillance **12 heures** (am/pm) ou **24 heures**. Appuyez sur la touche  pour afficher le symbole  devant cette option.

Appuyez sur la touche  pour confirmer le format de l'heure et retourner au menu précédent.

5 Consultation des données

Vue d'ensemble

- Les résultats de glycémie sont enregistrés du plus récent au plus ancien.
- Le glycomètre enregistre automatiquement jusqu'à 720 résultats de glycémie dans la mémoire avec l'heure et la date de l'analyse ainsi que tous les éventuels marquages de résultat.
- Une fois la limite de 720 résultats de glycémie enregistrés dépassée, le résultat de glycémie le plus ancien est remplacé par le résultat le plus récent.
- Seuls les résultats de glycémie affichant un marquage À jeun, Avant repas, Après repas ou Au coucher sont compris dans les moyennes du marquage correspondant.
- Tous les résultats de glycémie sont pris en compte dans le calcul des moyennes sur 7, 14, 30 et 90 jours, indépendamment du type de marquage qui y est lié.
- Les résultats de contrôle sont enregistrés dans la mémoire mais ne peuvent pas être consultés à partir du glycomètre. Pour pouvoir être consultés, les résultats de contrôle enregistrés doivent être transférés vers un logiciel compatible.
- Les résultats de contrôle ne sont pas pris en compte dans le calcul des moyennes ou des rapports de glycémie.
- Une fois la limite de 32 résultats de contrôle enregistrés dépassée, le résultat de contrôle le plus ancien est remplacé par le résultat de contrôle le plus récent.

AVERTISSEMENT

Risque de survenue d'un grave incident de santé

L'utilisation d'un seul résultat de glycémie dans la mémoire comme fondement pour la modification de votre traitement peut conduire à des décisions thérapeutiques incorrectes. N'apportez aucune modification à votre traitement en vous fondant sur un seul résultat de glycémie en mémoire. Avant de modifier votre traitement en vous fondant sur les résultats de glycémie en mémoire, consultez votre professionnel de la santé.

REMARQUE

Le glycomètre dispose d'une fonction d'auto-synchronisation de l'heure et de la date qui, en cas de liaison avec un dispositif mobile, permet de mettre automatiquement à jour l'heure et la date affichées sur le glycomètre. Même en cas d'utilisation de votre glycomètre dans différentes zones horaires, des résultats sont sauvegardés du plus récent au plus ancien et pas en fonction de l'heure et de la date.

Journal

1


9:30am 12/11/15

Menu principal

 Analyse

 Mes données

 Réglages

Allumez le glycomètre en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche  pour mettre en surbrillance **Mes données**. Appuyez sur la touche **OK**.


5 Consultation des données

2



Journal est mis en surbrillance. Appuyez sur la touche **OK**.

3

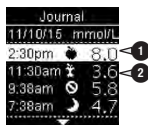

Journal	
11/10/15	mmol/L
2:30pm	8.0
11:30am	3.6
9:38am	5.8
7:38am	4.7

Appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour faire défiler les valeurs de l'affichage **Journal**.

Le résultat de glycémie le plus récent **1**.

Le deuxième résultat de glycémie le plus récent **2**.

4

Pour afficher les détails d'un résultat de glycémie, appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour le mettre en surbrillance. Appuyez sur la touche **OK**. Les détails du résultat de glycémie affichés ci-dessous apparaissent uniquement si la fonction **Objectifs de glyc.** est activée ou si des marquages ont été ajoutés à ce résultat de glycémie.

Le résultat de glycémie le plus récent



Journal	
2:30pm	12/11/15
8.0	mmol/L
↑ Dessus objectif	


Le deuxième résultat de glycémie le plus récent



Journal	
11:30am	12/11/15
3.6	mmol/L
↓ Dessous objec.	
Après dîner	

Moyennes

1

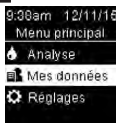

Allumez le glycomètre en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Mes données**. Appuyez sur la touche **OK**.

5 Consultation des données

2



Appuyez sur la touche pour mettre en surbrillance **Moyennes**. Appuyez sur la touche .


- Les résultats Objectif % peuvent être affichés pendant une période de 7, 14, 30 ou 90 jours.
- Les objectifs de glycémie doivent être réglés dans le glycomètre pour permettre la consultation des résultats Objectif %.

3



Appuyez sur la touche pour mettre en surbrillance une catégorie (l'exemple ici est **Tous**). Appuyez sur la touche .

1

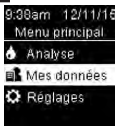

Allumez le glycomètre en appuyant brièvement sur la touche . À partir du **Menu principal**, appuyez


sur la touche pour mettre en surbrillance **Mes données**. Appuyez sur la touche .

4



Appuyez sur la touche pour mettre en surbrillance une période de temps (l'exemple ici est **90 jours**). Appuyez sur la touche .

2

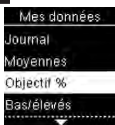

Appuyez sur la touche pour mettre en surbrillance **Objectif %**. Appuyez sur la touche .

5



Appuyez sur la touche pour retourner au menu précédent si vous souhaitez consulter une autre période de temps OU appuyez sur la touche ou pour faire défiler les différentes moyennes.

3



Appuyez sur la touche pour mettre en surbrillance une catégorie (l'exemple ici est **Avant repas**).

Appuyez sur la touche pour sélectionner l'option.

Pourcentage (%) objectif

La fonction Objectif % vous permet de consulter le pourcentage de résultats de glycémie appartenant aux catégories Tous, Avant repas, Après repas, À jeun et Au coucher qui sont considérés comme au-dessus de, dans ou au-dessous de vos objectifs de glycémie.

4




Appuyez sur la touche pour mettre en surbrillance une période de temps (l'exemple ici est **90 jours**). Appuyez sur la touche .

5 Consultation des données

5

●	Objectif %	
	Avant repas	
	90 jours	
↑	Dessus	15%
±	Dans	60%
↓	Dessous	25%
	Analyses	720

Objectif % s'affiche à l'écran (pour l'exemple **Avant repas**). Le nombre de l'ensemble des analyses comprises dans Objectif % s'affiche au bas de l'écran.

Appuyez sur la touche  pour retourner au menu précédent.

REMARQUE

L'analyse de vos résultats de glycémie enregistrés dans votre glycomètre vous permet ainsi qu'à votre professionnel de la santé d'évaluer de manière efficace votre gestion du diabète. Cette analyse constitue un outil précieux pour améliorer votre gestion du diabète. Soyez vigilant(e) lors de l'ajout de marquages à vos résultats de glycémie. Des marquages incorrects peuvent générer la détection erronée de tendances par le glycomètre si la fonction Tendances est réglée sur **Activer**.

Données basses/élevées

Votre professionnel de la santé peut vous indiquer l'intervalle de glycémie qui vous convient. Il est très important de respecter les limites de votre objectif de glycémie.

- Les objectifs de glycémie doivent être réglés dans le glycomètre afin de pouvoir permettre un suivi des résultats de glycémie classés comme bas/élevés (reportez-vous au paragraphe Objectifs de glycémie du chapitre Réglages du glycomètre pour obtenir de plus amples détails).
- Les résultats bas ou élevés comprennent uniquement des résultats de glycémie inférieurs ou supérieurs aux objectifs de glycémie définis dans le glycomètre.
- Les résultats bas ou élevés font l'objet d'un suivi sur 30 jours dans le glycomètre.

5 Consultation des données

Vous pouvez sélectionner des résultats bas et élevés pour les catégories suivantes de résultat de glycémie : Tous, Avant repas, Après repas, À jeun ou Au coucher.

Symbole	Nom	Description
	Tous	Comprend les résultats de glycémie bas et élevés en fonction des objectifs de glycémie réglés dans votre glycomètre.
	Avant repas	Vous pouvez afficher des résultats de glycémie bas ou élevés associés à un marquage Avant repas pour les catégories suivantes de résultat de glycémie : Tous, Avant déjeuner, Avant dîner, Avant souper et Avant collation.*
	Après repas	Vous pouvez afficher des résultats de glycémie bas ou élevés associés à un marquage Après repas pour les catégories suivantes de résultat de glycémie : Tous, Après déjeuner, Après dîner, Après souper et Après collation.*
	À jeun	Comprend les résultats de glycémie bas ou élevés obtenus à jeun et associés au marquage À jeun.
	Au coucher	Comprend les résultats de glycémie bas ou élevés obtenus au coucher et associés au marquage Au coucher.

*Les résultats de glycémie classés comme avant ou après des repas spécifiques sont uniquement disponibles si la fonction Tendances est réglée sur **Activer**.

1

9:30am 12/11/15
 Menu principal
 Analyse
 Mes données
 Réglages

Allumez le glycomètre en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Mes données**. Appuyez sur la touche **OK**.

2

Mes données
 Journal
 Moyennes
 Objectif %
 Bas/élevés

Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Bas/élevés**. Appuyez sur la touche **OK**.

3

Bas/élevés
 Résultats bas
 Résultat, élevés

Si la fonction Objectifs de glycémie est activée :

Appuyez sur la touche **▼** pour sélectionner **Résultat bas** ou **Résultat élevés** (l'exemple ici est **Résultat élevés**). Appuyez sur la touche **OK** ou

Bas/élevés
 Aucune donnée. Activer les obj. de glycém. pour suivre les résultats bas/élevés.

Si la fonction Objectifs de glycémie n'a PAS été activée dans les 30 derniers jours :

Ce message s'affiche sur le glycomètre (reportez-vous au paragraphe Objectifs de glycémie du chapitre Réglages du glycomètre pour obtenir de plus amples détails à propos de l'activation de la fonction Objectifs de glycémie).

5 Consultation des données

4



Appuyez sur la touche pour mettre en surbrillance une catégorie (l'exemple ici est **Avant repas**). Appuyez sur la touche .



Si les résultats de glycémie associés à des marquages détaillés relatifs aux repas sont enregistrés dans le journal :

Le glycomètre peut vous demander de sélectionner des catégories détaillées à afficher. Appuyez sur la touche pour mettre en surbrillance une catégorie (l'exemple ici est avant **Déjeuner**). Appuyez sur la touche .

5



Les données sélectionnées s'affichent (l'exemple ici est **Résult. élevés**). Appuyez sur la touche pour faire défiler les résultats de glycémie.

Appuyez sur la touche pour retourner au menu précédent.

REMARQUE

L'analyse de vos résultats de glycémie enregistrés dans votre glycomètre vous permet ainsi qu'à votre professionnel de la santé d'évaluer de manière efficace votre gestion du diabète. Cette analyse constitue un outil précieux pour améliorer votre gestion du diabète. Soyez vigilant(e) lors de l'ajout de marquages à vos résultats de glycémie. Des marquages incorrects peuvent générer la détection erronée de tendances par le glycomètre si la fonction Tendances est réglée sur **Activer**.

Tendances

- La fonction Tendances affiche uniquement les tendances basses ou tendances élevées actives en fonction des marquages ajoutés aux résultats de glycémie dans les 7 derniers jours.
- Une tendance est générée lorsque 2 résultats de glycémie inférieurs à l'objectif de glycémie ou 3 résultats de glycémie supérieurs à l'objectif de glycémie associés au même marquage sont détectés au cours d'une période de 7 jours.

5 Consultation des données

Les tendances peuvent être consultées sur le glycomètre de 3 manières différentes :

<p>9:38am 12/11/15 Menu principal Analyse Mes données Réglages Tendances</p>	<p>si une option de la fonction Tendances est affichée au bas du Menu principal.</p>
OU	
<p>9:38am 12/11/15 Menu principal Analyse Mes données Réglages</p>	<p>à partir de Mes données dans le Menu principal.</p>
OU	
<p>Tend. basse Nouvelle tendance détectée. Voir plus tard Détails</p>	<p>si le message Nouvelle tendance détectée s'affiche à l'écran lors de la réalisation d'une analyse de</p>


glycémie.

Les tendances détectées par le glycomètre peuvent être affichées dans le Menu principal de la manière suivante :

Tendances	Des tendances élevées et basses ont été détectées	Les tendances peuvent comprendre les résultats de glycémie suivants marqués à l'aide des marquages : Avant déjeuner, Après déjeuner, Avant dîner, Après dîner, Avant souper, Après souper, Avant collation, Après collation, À jeun ou Au coucher (reportez-vous au paragraphe Ajout de marquages à des résultats de glycémie du chapitre Analyses de glycémie).
Tendance élevée / Tend. élevées (Tendances élevées)	Une ou plusieurs tendance(s) élevée(s) a/ont été détectée(s)	
Tendance basse / Tendances basses	Une ou plusieurs tendance(s) basse(s) a/ont été détectée(s)	
Aucune tendance	Aucune tendance active sur la base des résultats de glycémie des 7 derniers jours	
Vide	La fonction Tendances est réglée sur Désactiver	


5 Consultation des données

1

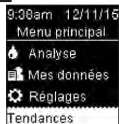

Allumez le glycomètre en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance l'option de la fonction Tendances au bas de l'affichage (l'exemple ici est **Tendances**). Appuyez sur la touche **OK**.

2

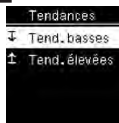

Appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Tend. basses** ou **Tend. élevées** (l'exemple ici est **Tend. basses**). Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner l'option.

3



Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance une catégorie à consulter (l'exemple ici est **Avant déjeuner**). Appuyez sur la touche **OK**.

4



Appuyez sur la touche **▼** pour faire défiler les résultats de glycémie. Appuyez sur la touche **↶** pour retourner au menu précédent.

Transfert de données sans fil

Cette fonction vous permet de transférer des données sans fil à partir de votre glycomètre vers un autre dispositif.

1



Allumez le glycomètre en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Mes données**. Appuyez sur la touche **OK**.

2



Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Transfert Données**. Appuyez sur la touche **OK**.

3



Appuyez sur la touche **▼** pour sélectionner **Sans fil**. Appuyez sur la touche **OK**.

5 Consultation des données

4

Si un dispositif n'a pas été lié à votre glycomètre :

Lier dispo.
Aucun dispositif
lié. Établir
liaison?

Non

Oui

Le glycomètre vous demande de lier un dispositif au glycomètre (reportez-vous au paragraphe Première liaison du chapitre Communication sans fil et liaison du glycomètre pour obtenir de plus amples détails).

ou

Si le glycomètre a déjà été lié à au moins un dispositif :

Choisir dispo.
✓ Device1234
Device2345
Device3456
Device4567


Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner un dispositif sans fil destiné au transfert de données.

5




Le glycomètre transfère les données vers le dispositif.

1

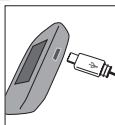

Connectez la petite extrémité du câble USB au glycomètre.

2

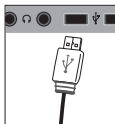

Connectez l'extrémité plus large du câble USB au port USB du PC.

Si le glycomètre était éteint, il s'allume.

3

Lancez le logiciel de gestion du diabète et démarrez un transfert de données.

4



Le glycomètre transfère les données vers le logiciel.

Transfert de données à l'aide d'un câble USB

Cette fonction vous permet de transférer des données de votre glycomètre vers un logiciel spécifique destiné à la gestion du diabète sur un PC à l'aide d'un câble USB.

6 Communication sans fil et liaison du glycomètre

Vue d'ensemble

Vous pouvez synchroniser vos données de diabète avec un dispositif mobile de manière automatique via une connexion sans fil. La procédure de création d'une connexion entre un glycomètre et un autre dispositif est ce qu'on appelle une liaison. Vous devez disposer d'une application sur votre dispositif mobile qui prenne en charge les données du glycomètre.

Réglage	Options	Fonction
Mode avion	Activer / Désactiver	Définissez la disponibilité de la communication sans fil. Activer – la communication sans fil n'est pas disponible. Désactiver – la communication sans fil est disponible.
Dispo. par défaut (Dispositif par défaut)	Liste des dispositifs liés au glycomètre	S'il existe plus d'un dispositif lié, sélectionnez le dispositif avec lequel les fonctions Envoi automatique et Synchronisation de l'heure communiqueront.
Envoi auto. (Envoi automatique)	Activer / Désactiver	Définissez si les données sont automatiquement envoyées au dispositif lié par défaut après chaque analyse. Activer – les données sont automatiquement envoyées au dispositif lié par défaut. Désactiver – les données ne sont pas automatiquement envoyées au dispositif lié par défaut.
Synchro. heure (Synchronisation de l'heure)	Activer / Désactiver	Définissez si une synchronisation de l'heure et de la date avec le dispositif lié par défaut doit avoir lieu. Activer – l'heure et la date affichées sur le glycomètre sont synchronisées avec l'heure et la date du dispositif lié par défaut. Désactiver – l'heure et la date affichées sur le glycomètre ne sont pas synchronisées avec l'heure et la date du dispositif lié par défaut.
Liaison	Lier dispositif / Suppr. liaison (Supprimer liaison)	Définissez si vous souhaitez lier un dispositif ou supprimer un dispositif lié.

6 Communication sans fil et liaison du glycomètre

Première liaison

Les étapes ci-dessous s'appliquent à la première liaison.

Jusqu'à 5 dispositifs peuvent être simultanément liés au glycomètre.

Chaque dispositif doit être lié au glycomètre séparément.

Le glycomètre et le dispositif à lier doivent se trouver à moins de 1 mètre l'un de l'autre.

1

Préparez le dispositif à la liaison. Reportez-vous aux instructions du dispositif pour savoir comment procéder à sa liaison.

2

9:30am 12/11/15
Menu principal
Analyse
Mes données
Réglages

Allumez le glycomètre en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Réglages**. Appuyez sur la touche **OK**.

3

Réglages
Heure/date
Signal sonore
Sans fil
Plus d'options

Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Sans fil**. Appuyez sur la touche **OK**.

4

Lier dispo.
Aucun dispositif lié. Établir liaison?
Non
Oui

Lier dispo. s'affiche à l'écran. Pour lier un dispositif, appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Oui**. Appuyez sur la touche **OK**.

5

Lier dispositif
123456

Saisir le code sur le dispositif.

Le glycomètre affiche son code.

6

Le dispositif mobile affiche une liste des dispositifs détectés, y compris le glycomètre. Sélectionnez le glycomètre dans la liste. Saisissez le code du glycomètre de l'étape 5 sur le dispositif à lier lorsque celui-ci vous le demande.

7

Lier dispositif

✓
Lié avec Device1234

Une fois la liaison terminée, le symbole **✓** et le nom du dispositif lié s'affichent à l'écran du glycomètre.


Appuyez sur la touche **OK** pour retourner au menu précédent.

Mode avion

Définissez la disponibilité ou l'indisponibilité de la communication sans fil. Lorsque le **Mode avion** est activé, le symbole **✈** s'affiche dans la barre de titre et la communication sans fil est impossible.

6 Communication sans fil et liaison du glycomètre

1

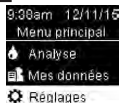

9:30am 12/11/15
Menu principal
Analyse
Mes données
Réglages

Allumez le glycomètre en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Réglages**. Appuyez sur la touche **OK**.


2



Réglages
Heure/date
Signal sonore
Sans fil
Plus d'options

Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Sans fil**. Appuyez sur la touche **OK**.

3

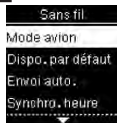

Sans fil
Mode avion
Dispo. par défaut
Envoi auto.
Synchro. heure

Mode avion est mise en surbrillance. Appuyez sur la touche **OK**.


4



Mode avion
Activer
Désactiver
Aide

Appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Activer** ou **Désactiver**. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le symbole **✓** devant cette option.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer l'option et retourner au menu précédent.

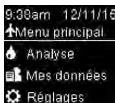

9:30am 12/11/15
Menu principal
Analyse
Mes données
Réglages


L'affichage **Menu principal** avec glycomètre en mode avion.

6 Communication sans fil et liaison du glycomètre

Dispositif par défaut

Si plus d'un dispositif est lié, sélectionnez le dispositif lié par défaut pour les fonctions **Envoi auto.** et **Synchro. heure.**


1

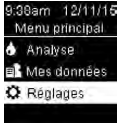

9:30am 12/11/15
Menu principal
Analyse
Mes données
Réglages

Allumez le glycomètre en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Réglages**. Appuyez sur la touche **OK**.

2



Réglages
Heure/date
Signal sonore
Sans fil
Plus d'options

Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Sans fil**. Appuyez sur la touche **OK**.


3



Sans fil
Mode avion
Dispo. par défaut
Envoi auto.
Synchro. heure

Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Dispo. par défaut**. Appuyez sur la touche **OK**.

4




Dispo. par déf.
✓ Device1234
Device2345
Device3456
Aide

Une liste des dispositifs liés s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance le dispositif que vous souhaitez sélectionner comme dispositif par défaut. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le symbole **✓** devant cette option. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer l'option et retourner au menu précédent.

Envoi automatique

Définissez si les données sont automatiquement envoyées au dispositif lié par défaut après chaque analyse.


1

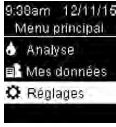

9:30am 12/11/15
Menu principal
Analyse
Mes données
Réglages

Allumez le glycomètre en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Réglages**. Appuyez sur la touche **OK**.

2



Réglages
Heure/date
Signal sonore
Sans fil
Plus d'options

Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Sans fil**. Appuyez sur la touche **OK**.


3



Sans fil
Mode avion
Dispo. par défaut
Envoi auto.
Synchro. heure

Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Envoi auto.**. Appuyez sur la touche **OK**.

4

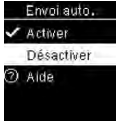

Envoi auto.
✓ Activer
Désactiver
Aide

Appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Activer** ou **Désactiver**. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le symbole **✓** devant cette option. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer l'option et retourner au menu précédent.

6 Communication sans fil et liaison du glycomètre

Synchronisation de l'heure

Définissez si une synchronisation de l'heure et de la date avec le dispositif lié par défaut doit avoir lieu.

1

9:30am 12/11/15
Menu principal
Analyse
Mes données
Réglages

Allumez le glycomètre en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche **▼**

pour mettre en surbrillance **Réglages**. Appuyez sur la touche **OK**.

2

Réglages
Heure/date
Signal sonore
Sans fil
Plus d'options

Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Sans fil**. Appuyez sur la touche **OK**.

3

Sans fil
Mode avion
Dispo. par défaut
Envoi auto.
Synchro. heure

Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Synchro. heure**. Appuyez sur la touche **OK**.

4

Synchro. heure
✓ Activer
Désactiver
Aide

Appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Activer** ou **Désactiver**. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le symbole ✓ devant cette option.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer l'option et retourner au menu précédent.

Liaison de dispositifs supplémentaires

Cette procédure permet d'ajouter un autre dispositif lié (ce qui suppose qu'il existe au moins 1 dispositif lié).

Vous pouvez lier jusqu'à 5 dispositifs.

Si 5 dispositifs sont déjà liés, vous devez supprimer une de ces liaisons avant de pouvoir ajouter un autre dispositif.

Tout dispositif sélectionné deviendra l'option par défaut jusqu'au prochain changement.

1

9:30am 12/11/15
Menu principal
Analyse
Mes données
Réglages

Allumez le glycomètre en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Réglages**. Appuyez sur la touche **OK**.

2

Réglages
Heure/date
Signal sonore
Sans fil
Plus d'options

Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Sans fil**. Appuyez sur la touche **OK**.


3

Sans fil
Dispo. par défaut
Envoi auto.
Synchro. heure
Liaison

Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Liaison**. Appuyez sur la touche **OK**.

6 Communication sans fil et liaison du glycomètre


4

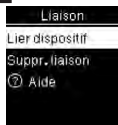

Appuyez sur la touche  ou  pour mettre en surbrillance **Lier dispositif**. Appuyez sur la touche .




S'il existe moins de 5 dispositifs liés :

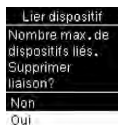Lier dispositif s'affiche à l'écran. Passez à l'étape 5.






S'il existe déjà 5 dispositifs liés :

Le message **Nombre max. de dispositifs liés** s'affiche à l'écran. Vous devez

supprimer un dispositif lié avant de pouvoir passer à l'étape 5. Appuyez sur la touche  ou  pour mettre en surbrillance **Oui**. Appuyez sur la touche .

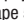


Appuyez sur la touche  ou  pour mettre en surbrillance le dispositif à supprimer. Appuyez sur la touche . Passez à l'étape 5.

5

Préparez l'autre dispositif à la liaison. Reportez-vous aux instructions de l'autre dispositif pour savoir comment procéder à sa liaison.

6

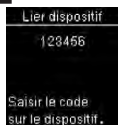


Le glycomètre affiche son code.


7

Le dispositif mobile affiche une liste des dispositifs détectés, y compris le glycomètre. Sélectionnez le glycomètre dans la liste. Saisissez le code du glycomètre de l'étape 6 sur le dispositif à lier lorsque celui-ci vous le demande.


8


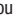




Une fois la liaison terminée, le symbole  et le nom du dispositif lié s'affichent à l'écran du glycomètre.

Appuyez sur la touche .

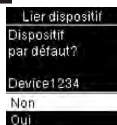9



S'il existe plus d'un dispositif lié, vous devez choisir si vous souhaitez définir le nouveau dispositif comme dispositif par défaut. Appuyez sur la touche  ou  pour mettre en surbrillance **Non** ou **Oui**. Appuyez sur la touche  pour confirmer l'option et retourner à **Liaison**.

Appuyez sur la touche  pour retourner au menu précédent.

Suppression d'une liaison


Cette procédure permet de supprimer un dispositif lié (ce qui suppose qu'il existe au moins 1 dispositif lié).

Vous pouvez lier jusqu'à 5 dispositifs. Si 5 dispositifs sont déjà liés, vous devez supprimer une de ces liaisons avant de pouvoir lier un autre dispositif.

Tout dispositif sélectionné deviendra l'option par défaut jusqu'au prochain changement.

6 Communication sans fil et liaison du glycomètre

1

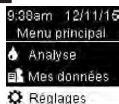

9:30am 12/11/15
Menu principal
Analyse
Mes données
Réglages

Allumez le glycomètre en appuyant brièvement sur la touche **OK**. À partir du **Menu principal**, appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Réglages**. Appuyez sur la touche **OK**.


2



Réglages
Heure/date
Signal sonore
Sans fil
Plus d'options

Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Sans fil**. Appuyez sur la touche **OK**.


3

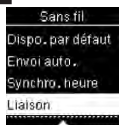

Sans fil
Dispo. par défaut
Envoi auto.
Synchro. heure
Liaison

Appuyez sur la touche **▼** pour mettre en surbrillance **Liaison**. Appuyez sur la touche **OK**.

4

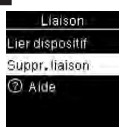

Liaison
Lier dispositif
Suppr. liaison
Aide

Appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Suppr. liaison**. Appuyez sur la touche **OK**.

5



Suppr. liaison
✓ Device1234
Device2345
Device3456
Device4567

Appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour mettre en surbrillance le dispositif à supprimer. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.


6



Suppr. liaison
Supprimé.
Device1234
✓
Nouv. par défaut :
Phone456

Si le dispositif sélectionné n'est pas le dispositif par défaut :

La liaison est supprimée. Le nom de dispositif supprimé et le symbole **✓** s'affichent à l'écran.

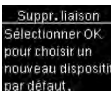

Suppr. liaison
Sélectionner OK.
pour choisir un
nouveau dispositif
par défaut.

Si le dispositif sélectionné est le dispositif par défaut :

Le glycomètre vous demande de sélectionner un nouveau dispositif par défaut. S'il ne reste plus qu'un seul dispositif, celui-ci deviendra le dispositif par défaut. La liste des dispositifs liés s'affiche à l'écran.



Suppr. liaison
Supprimé.
Device1234
✓
Nouv. par défaut :
Phone456

Mettez en surbrillance le nouveau dispositif par défaut et appuyez sur la touche **OK**. Le symbole **✓** et le nom du dispositif supprimé s'affichent à l'écran du glycomètre avec le nouveau dispositif par défaut.

7 Entretien et dépannage du glycomètre

Entretien du glycomètre

Le glycomètre procède automatiquement à un autodiagnostic à chaque mise sous tension et vous avertit de tout problème. Reportez-vous au paragraphe Messages d'erreur du présent chapitre.

Si vous laissez tomber le glycomètre ou si vous doutez de l'exactitude des résultats, contactez Accu-Chek Soins aux Patients au 1 800 363-7949.


AVERTISSEMENT

Risque de lésions mortelles

Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Référez-vous à l'avertissement contenu dans l'introduction de ce manuel de l'utilisateur pour obtenir de plus amples informations.


Remplacement des piles


1

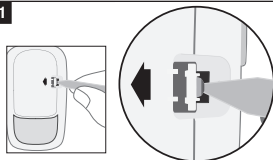


Ouvrez le couvercle (à l'épreuve des enfants) du compartiment des piles en insérant un objet fin, tel qu'un stylo, dans la fente (voir image ci-dessus). Appuyez sur l'onglet dans le sens de la flèche et soulevez le couvercle du compartiment des piles.


2

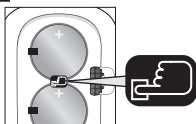

Relâchez les piles usagées en appuyant sur le bouton . Retirez les piles usagées. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt/Réglage/OK à l'avant du glycomètre et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes.

3

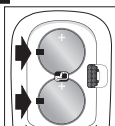

Faites glisser les nouvelles piles sous les languettes noires et le bouton  en veillant à ce que la **face positive (+) soit dirigée vers le haut**. Remettez le couvercle du compartiment des piles en place et emboîtez-le. Éliminez immédiatement les anciennes piles.

REMARQUE

- Ayez toujours des piles de rechange en réserve.
- La durée de vie des piles peut varier en raison de facteurs tels que la température et le fabricant.
- Le glycomètre utilise deux piles au lithium de 3 volts, de type pile bouton CR2032. Ce type de pile se trouve facilement en magasin.
- Veillez à toujours remplacer les deux piles en même temps et à utiliser une seule et même marque.
- Les données du journal sont enregistrées pendant le remplacement des piles.

7 Entretien et dépannage du glycomètre

Nettoyage et désinfection du glycomètre

Quelle est la différence entre nettoyage et désinfection?

Le nettoyage consiste à enlever la saleté et les taches sur le glycomètre.

La désinfection correspond à l'élimination de la plupart des micro-organismes responsables de maladies et des autres types de micro-organismes (agents pathogènes à diffusion hémotogène), mais pas tous, du glycomètre.

Agents de nettoyage et de désinfection approuvés

Les ingrédients actifs suivants ont été approuvés pour le nettoyage et la désinfection du glycomètre :

- mélange de chlorure d'alkyl diméthyl éthylbenzyl ammonium (0,125 %), de chlorure de benzalkonium (0,125 %) et d'isopropanol (14,85 %).

Nous recommandons les serviettes germicides jetables Sani-Cloth Plus. Ce produit contient les ingrédients actifs approuvés et est homologué au Canada. Roche a testé le produit approuvé pour un total de 520 cycles de nettoyage et de désinfection (260 cycles de nettoyage et 260 cycles de désinfection), ce qui correspond à nettoyer et désinfecter le glycomètre une fois par semaine pour une période de 5 ans. Pour des renseignements supplémentaires, consultez :

1. Avis de santé publique de la FDA : "Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens: Initial Communication, (2010). Update 11/29/2010." <http://wayback.archive-it.org/7993/20161022010458/http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm>.

Consulté le 17 janvier 2018.

2. Rappel clinique du CDC : "Infection Prevention during Blood Glucose Monitoring and Insulin Administration". <http://www.cdc.gov/injectionsafety/blood-glucose-monitoring.html> Consulté le 09 novembre 2015.

REMARQUE

- Lavez-vous toujours soigneusement les mains à l'eau et au savon avant de manipuler le glycomètre, l'autopiqueur ou les bandelettes-test.
- Pour obtenir du soutien technique ou des réponses à vos questions relatives au nettoyage et à la désinfection, contactez Accu-Chek Soins aux Patients au 1 800 363-7949.

Nettoyage et désinfection du glycomètre

Pour nettoyer et désinfecter le glycomètre sans l'endommager, suivez les procédures suivantes attentivement.

Quand faut-il nettoyer et désinfecter le glycomètre?

- Nettoyez le glycomètre pour le débarrasser de la saleté et des taches visibles avant de le désinfecter.
- Nettoyez et désinfectez le glycomètre au moins une fois par semaine et chaque fois que vous notez la présence de sang sur le glycomètre.
- Nettoyez et désinfectez le glycomètre avant de le laisser manipuler par qui que ce soit d'autre. Ne permettez à personne d'utiliser votre glycomètre pour effectuer une analyse de sa propre glycémie.

7 Entretien et dépannage du glycomètre

Que faut-il nettoyer et désinfecter?

Il faut nettoyer et désinfecter les parties suivantes du glycomètre :


- la zone qui entoure les fentes et ouvertures du glycomètre (ne laissez pas d'humidité pénétrer par ces fentes et ouvertures).
- l'écran du glycomètre.
- le boîtier du glycomètre (toute la surface du glycomètre : avant et arrière)

Comment nettoyer et désinfecter le glycomètre?

AVERTISSEMENT

À défaut de suivre ces instructions, vous pourriez endommager le glycomètre et altérer son fonctionnement.

- NE PAS nettoyer et désinfecter le glycomètre pendant que vous effectuez une analyse de glycémie ou un test de contrôle.
- NE PAS faire entrer l'humidité dans les fentes et les ouvertures du glycomètre.
- NE PAS vaporiser une solution nettoyante directement sur le glycomètre.
- NE PAS immerger le glycomètre dans un liquide.
- Utilisez toujours le même agent pour le nettoyage et la désinfection de votre glycomètre.

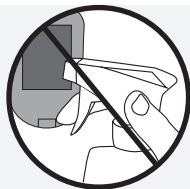


1



Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau savonneuse.

2

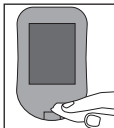

Éteignez le glycomètre et essuyez tout le boîtier à l'aide d'une serviette Sani-Cloth Plus. Portez une attention particulière aux régions avoisinant la fente d'insertion de la bandelette-test et les autres ouvertures du glycomètre.

Assurez-vous toutefois qu'aucun liquide ne pénètre dans ces fentes et ouvertures.

7 Entretien et dépannage du glycomètre

3

Assurez-vous que vous utilisez une serviette Sani-Cloth Plus différente selon si vous nettoyez ou désinfectez le glycomètre. Pour désinfecter le glycomètre, utilisez une nouvelle serviette Sani-Cloth Plus et répétez l'étape 2, en observant un temps de contact entre le glycomètre et le produit de 3 minutes.

Assurez-vous toutefois qu'aucun liquide ne pénètre dans les fentes et ouvertures.

4



Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau savonneuse.

Messages d'erreur



AVERTISSEMENT

Risque de survenue d'un grave incident de santé

L'utilisation d'un message d'erreur comme fondement pour la modification de votre traitement peut conduire à des décisions thérapeutiques incorrectes.

- Ne prenez jamais de décision thérapeutique sur la base d'un message d'erreur.
- Si vous avez des questions ou constatez l'affichage d'un quelconque message d'erreur, contactez Accu-Chek Soins aux Patients au 1 800 363-7949.



Le glycomètre ne s'allume pas ou l'écran reste vide.

- Les piles sont à plat.


Insérez de nouvelles piles.

- L'écran est défectueux. / Le glycomètre est défectueux.

Contactez Accu-Chek Soins aux Patients au 1 800 363-7949.

- Températures excessives.

Déplacez le glycomètre dans un endroit à température plus modérée.

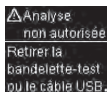

⚠ Analyse
non autorisée
Retirer la
bandelette-test
ou le câble USB.

Le glycomètre est connecté à un PC et aucune analyse ne peut avoir lieu.

Déconnectez le câble USB et effectuez une analyse OU retirez la bandelette-test et lancez un transfert de données.

7 Entretien et dépannage du glycomètre

 Connexion interrompue

Reconnecter le câble USB puis réessayer.

La connexion entre le glycomètre et le PC a été interrompue.

Déconnectez et reconnectez le câble USB, puis réessayez la connexion. Contactez Accu-Chek Soins aux Patients au 1 800 363-7949 si la connexion est à nouveau interrompue.

 Aucune connexion

Connecter le câble USB pour continuer.

Il n'existe aucune connexion entre le glycomètre et le PC.

Connectez le câble USB et réessayez la connexion.

 Échec transfert

Le dispositif lié doit être à portée et allumé.

Les résultats de glycémie n'ont pas été transmis au dispositif lié.


Assurez-vous que le dispositif lié est à portée du glycomètre et qu'il est allumé.

 Échec de connexion

Vérifier PC ou câble USB.

Les données n'ont pas pu être transmises du glycomètre au PC.

Vérifiez le PC ou le câble USB.

 Transfert non autorisé

La communication sans fil n'est pas autorisée en mode avion.

Les données ne peuvent pas être transmises au dispositif lié car le glycomètre est en Mode avion.

Tentez à nouveau de transférer des données lorsque le glycomètre n'est plus en Mode avion.

 Résultats exclus

Un ou plusieurs résultats peuvent être exclus des moyennes.

Un ou plusieurs résultats de glycémie sont exclus des moyennes sélectionnées car ils ne sont pas valides ou dépassent l'intervalle d'analyse du système.

7 Entretien et dépannage du glycomètre

⚠ Résultats
exclus

Un ou plusieurs
résultats peuvent
être exclus des
données
d'objectif %.

Un ou plusieurs résultats de glycémie sont exclus des données Objectif % sélectionnées car ils ne sont pas valides.

⚠ Résultats
exclus

Un ou plusieurs
résultats peuvent
être exclus des
résultats bas/
élevés.

Un ou plusieurs résultats de glycémie sont exclus des données Bas/élevés sélectionnées car ils ne sont pas valides.

⚠ Date non
valide

Vérifier la date.

La date saisie n'est pas valide.
Saisissez une date correcte.

⚠ Mode avion
actif

Fonction Sans fil
est désactivée.
Le réglage
sélectionné a été
enregistré.

Un des réglages du glycomètre a été modifié pendant que celui-ci était en Mode avion.

La modification du réglage ne prendra effet que lorsque le Mode avion sera désactivé.

⚠ Mode avion
actif

Fonction Sans fil
est désactivée.
Liaison est
non autorisée.

Toute liaison au dispositif est impossible en Mode avion.

Tentez à nouveau de procéder à la liaison lorsque le glycomètre n'est plus en Mode avion.

⚠ Envoi auto.
non terminé

Transfert en
attente. Le dispo-
sitif lié doit être
à portée et
allumé.

Le résultat de glycémie n'a pas été envoyé au dispositif lié par défaut. Le transfert est toujours en attente.

Placez le glycomètre et le dispositif lié près l'un de l'autre.

7 Entretien et dépannage du glycomètre




La liaison du glycomètre à un dispositif a échoué.

Tentez à nouveau de procéder à la liaison.



La bandelette-test est éventuellement endommagée, mal insérée ou a déjà été utilisée.

Retirez la bandelette-test et réinsérez-la ou remplacez-la si elle est endommagée ou a déjà été utilisée.

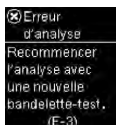

Une erreur est survenue au niveau du glycomètre ou de la bandelette-test.

Ce message d'erreur est susceptible d'apparaître si le bouchon du contenant de bandelettes-test n'a pas été correctement refermé. Les bandelettes-test ont été endommagées en raison d'un stockage ou d'une manipulation inappropriés.

Ne prenez jamais de décision thérapeutique sur la base d'un message d'erreur.

Recommencez l'analyse de glycémie. En cas d'affichage d'un deuxième message d'erreur E-3, réalisez un test de contrôle avec la solution de contrôle et une nouvelle bandelette-test. Reportez-vous au paragraphe Réalisation d'un test de contrôle du chapitre Tests de contrôle. Si vous continuez de recevoir un message d'erreur E-3, utilisez une méthode alternative d'analyse de votre glycémie, telle qu'un glycomètre et des bandelettes-test auxiliaires. Si la méthode alternative fournit un résultat de glycémie extrêmement élevé ou en l'absence d'une méthode alternative disponible, **contactez votre professionnel de la santé dans les plus brefs délais.**

Dans de rares cas, le message d'erreur E-3 peut indiquer que votre glycémie est extrêmement élevée et au-dessus de l'intervalle d'analyse du système.

Reportez-vous au paragraphe Résultats de glycémie inhabituels du chapitre Analyses de glycémie pour connaître d'autres causes possibles du message d'erreur.

7 Entretien et dépannage du glycomètre

⊗ Goutte trop petite
Recommencer l'analyse avec une nouvelle bandelette-test.
(E-4)

La bandelette-test n'a pas aspiré suffisamment de sang ou de solution de contrôle pour que l'analyse de glycémie ou le test de contrôle soit possible, ou bien l'aspiration suffisante de sang ou de solution de contrôle s'est produite après le démarrage de l'analyse de glycémie ou du test de contrôle.

Éliminez la bandelette-test et recommencez l'analyse de glycémie ou le test de contrôle.

⊗ Goutte appliquée trop tôt
Recommencer l'analyse avec une nouvelle bandelette-test.
(E-5)

L'aspiration du sang ou de la solution de contrôle par la bandelette-test a été effectuée avant que ne s'affiche **Appliquer goutte** à l'écran.

Éliminez la bandelette-test et recommencez l'analyse de glycémie ou le test de contrôle.

⊗ Erreur électronique
Retirer les piles, appuyer sur un bouton puis réinsérer les piles.
(E-7)

Une erreur électronique s'est produite. Retirez les piles, appuyez sur la touche Marche/Arrêt/Réglage/OK et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes, puis réinsérez les piles. Effectuez une analyse de glycémie ou un test de contrôle.

⊗ Erreur de température
Placer le glycomètre dans un endroit à température conforme.
(E-8)


La température est supérieure ou inférieure aux températures préconisées pour l'utilisation du système.

Reportez-vous à la notice d'utilisation des bandelettes-test pour obtenir des renseignements relatifs aux conditions de fonctionnement du système. Déplacez-vous dans un endroit où la température est conforme à l'intervalle de température préconisé et recommencez l'analyse de glycémie ou le test de contrôle. N'essayez pas d'accélérer le réchauffement ou le refroidissement du glycomètre.


7 Entretien et dépannage du glycomètre



Il se peut que les piles soient à plat. Rallumez le glycomètre. **Si vous vous trouvez dans un endroit frais, déplacez-vous dans un endroit à température modérée et renouvelez l'analyse de glycémie ou le test de contrôle.** Si le message s'affiche toujours après plusieurs tentatives, remplacez les piles. Si le message s'affiche de nouveau après le remplacement des piles, retirez les piles, appuyez sur la touche Marche/Arrêt/Réglage/OK et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes, puis réinsérez les piles.

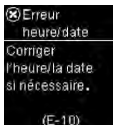


Il est possible que les réglages de l'heure et de la date soient erronés. Assurez-vous que l'heure et la date sont correctes et corrigez si nécessaire.

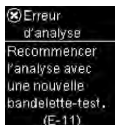


La bandelette-test est éventuellement endommagée.

Recommencez l'analyse de glycémie ou le test de contrôle avec une nouvelle bandelette-test.

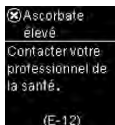

Votre échantillon de sang contient éventuellement un taux élevé d'ascorbate.

Contactez votre professionnel de la santé.

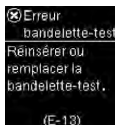


La fente d'insertion de la bandelette-test peut contenir des fluides ou des matières étrangères.

Retirez et réinsérez la bandelette-test ou recommencez l'analyse de glycémie ou le test de contrôle à l'aide d'une nouvelle bandelette-test. Si le problème persiste, contactez Accu-Chek Soins aux Patients au 1 800 363-7949.



7 Entretien et dépannage du glycomètre




Une erreur électronique s'est produite. Contactez Accu-Chek Soins aux Patients au 1 800 363-7949.

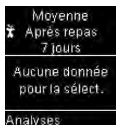

Il n'existe aucun résultat de glycémie correspondant aux critères définis pour les données sélectionnées.

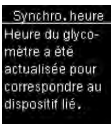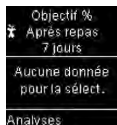


L'heure et la date du glycomètre ont été changées pour correspondre à celles du dispositif lié.

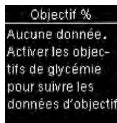


La fonction Objectifs de glycémie est réglée sur **Désactiver** et aucun résultat correspondant aux données Objectif % n'est enregistré dans le glycomètre.





Il n'existe aucun résultat dans le journal.

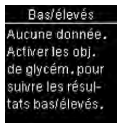

La fonction Objectifs de glycémie est réglée sur **Désactiver** et aucun résultat correspondant aux données Bas/élevés n'est enregistré dans le glycomètre.

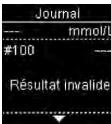


Le journal comprend un résultat non valide.

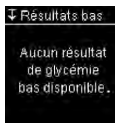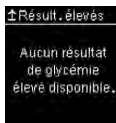


Il n'existe aucun résultat enregistré dans le glycomètre pour les données sélectionnées.

7 Entretien et dépannage du glycomètre

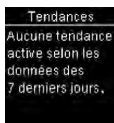

La fonction Tendances est réglée sur **Activer** mais il n'existe aucune tendance active enregistrée dans le glycomètre.

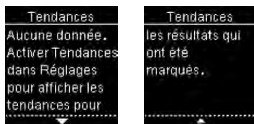

La fonction Tendances est réglée sur **Désactiver**.



La glycémie peut être au-dessus de l'intervalle d'analyse du système. Reportez-vous au paragraphe Résultats de glycémie inhabituels du chapitre Analyses de glycémie.



La glycémie peut être au-dessous de l'intervalle d'analyse du système.

Reportez-vous au paragraphe Résultats de glycémie inhabituels du chapitre Analyses de glycémie.




Les piles sont presque à plat.

Remplacez les piles maintenant. Si le symbole s'affiche de nouveau après le remplacement des piles, retirez les piles, appuyez sur la touche Marche/Arrêt/Réglage/OK et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes, puis réinsérez les piles.

8 Informations techniques

Limitations du produit

Les caractéristiques techniques et les limitations du produit les plus récentes sont fournies dans la notice d'utilisation des bandelettes-test et des solutions de contrôle.

Caractéristiques techniques	
Volume de sang nécessaire Type d'échantillon Durée d'analyse Intervalle d'analyse Conditions de stockage des bandelettes-test Conditions de fonctionnement du système	Reportez-vous à la notice d'utilisation des bandelettes-test.
Conditions de stockage du glycomètre	Température : entre -25 et 70 °C
Capacité de la mémoire	720 résultats de glycémie et 32 résultats de contrôle avec l'heure et la date
Arrêt automatique	90 secondes
Alimentation	Deux piles au lithium de 3 volts (type pile bouton CR2032)
Écran	Écran à cristaux liquides
Dimensions	80 × 47 × 20 mm (longueur × largeur × hauteur)
Poids	Environ 48 g (avec piles)
Construction	Portatif
Classe de protection	III
Type de glycomètre	Le glycomètre Accu-Chek Guide convient pour un fonctionnement en continu.
Conditions de stockage des solutions de contrôle	Reportez-vous à la notice d'utilisation de la solution de contrôle.
Interfaces 	USB : connecteur micro-B; technologie <i>Bluetooth</i> ® Low Energy; certifié Continua Certified® à un dispositif qui est certifié Continua Certified.
Connectivité aux fréquences radio	Technologie Bluetooth Low Energy fonctionnant à la bande de fréquence de 2,402 GHz à 2,480 GHz avec une puissance transmise maximale de 0 dBm (1 mW).

8 Informations techniques

Technologie sans fil Bluetooth

Le présent dispositif est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux dispositifs radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas produire d'interférence, et (2) le dispositif doit accepter toute interférence radioélectrique subie, même si l'interférence est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Étiquette de conformité à la NMB-003 d'Industrie Canada :

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Compatibilité électromagnétique – Le glycomètre répond aux exigences en matière d'émissions électromagnétiques conformément à la norme EN 61326-2-6. Ses émissions électromagnétiques sont donc faibles. Il n'y a pas lieu de s'attendre à des interférences du glycomètre qui auraient des répercussions sur d'autres dispositifs électriques.

Analyse de rendement – Reportez-vous à la notice d'utilisation des bandelettes-test.

Principe d'analyse – Reportez-vous à la notice d'utilisation des bandelettes-test.

Déclaration de conformité – Roche déclare que l'équipement radioélectrique du type glycomètre Accu-Chek Guide est

conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://declarations.accu-chek.com>

Protocole de communication – Le glycomètre Accu-Chek Guide est certifié Continua Certified. Continua Certified signifie que ce produit est conforme aux normes applicables IEEE 11073-10417, et qu'il a été testé et certifié en accord avec la directive de création Continua 2014 qui comprennent la spécification relative à la glycémie pour la technologie sans fil Bluetooth, *Bluetooth SIG, Glucose Profile, Version 1.0* et *Bluetooth SIG, Glucose Service, Version 1.0*.

Renseignements sur la sécurité du produit



AVERTISSEMENT

- Des champs électromagnétiques forts peuvent interférer sur le bon fonctionnement du glycomètre. N'utilisez pas le glycomètre près de sources de radiations électromagnétiques fortes.
- Afin d'éviter les décharges électrostatiques, n'utilisez pas le glycomètre dans un environnement trop sec, particulièrement en présence de matériel synthétique.

Élimination du glycomètre



AVERTISSEMENT

Risque d'infection

Lors d'une analyse de glycémie, le glycomètre peut être en contact avec du sang. Les glycomètres usagés présentent donc un risque d'infection. Avant l'élimination du glycomètre, retirez la pile ou les piles.

Dans ces conditions, éliminez le glycomètre usagé conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays. L'administration municipale vous indiquera la marche à suivre pour éliminer le glycomètre.

Le glycomètre ne tombe pas dans le champ d'application de la Directive Européenne 2012/19/UE – (Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)).

Éliminez les piles usagées conformément à la réglementation locale en vigueur en matière d'environnement.






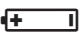












Le présent produit comprend des constituants internes qui contiennent des substances extrêmement préoccupantes (SVHC), en l'espèce du 1,2-diméthoxyéthane (CAS 110-71-4), de l'hexabromocyclododécane (CAS 25637-99-4), du titanate de plomb (CAS 12060-00-3) et/ou du titano-zirconate de plomb (CAS 12626-81-2) à une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse, telles qu'identifiées aux termes du règlement REACH et ajoutées à la liste des candidats en vue d'une autorisation.

Aucune exposition directe aux substances n'a lieu et aucun risque n'est donc encouru en cas d'utilisation de l'instrument conformément aux instructions d'utilisation.

8 Informations techniques

Signification des symboles

Les symboles figurant sur la boîte, sur la plaque d'identification et dans les instructions d'utilisation du glycomètre Accu-Chek Guide sont présentés ci-dessous avec leur signification.

	Consulter les instructions d'utilisation ou consulter les instructions d'utilisation en format électronique
	Attention, se conformer aux consignes de sécurité figurant dans les instructions d'utilisation du produit.
	Limite de température
	Date de péremption
	Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
	Pile bouton 3 volts, type CR2032
	Risques biologiques – Les glycomètres usagés constituent une source potentielle d'infection.
	Date de fabrication
	Dispositif médical de diagnostic in vitro
	Dispositif d'autodiagnostic
	Dispositif diagnostique clinique in vitro
	Fabricant
	Identifiant unique du dispositif
	Code article international
	Numéro de référence
	Numéro de série
	Numéro de lot
	Conforme aux exigences en vigueur fixées par la législation européenne

8 Informations techniques

Fournitures supplémentaires

Bandelettes-test : bandelettes-test
Accu-Chek Guide

Solutions de contrôle : solutions de
contrôle Accu-Chek Guide

9 Garantie

Garantie

Les dispositions légales relatives à la vente et aux garanties des biens de consommation dans le pays d'achat prévalent.

Index

A

analyse de glycémie, réalisation 12

B

bandelettes-test 11

C

caractéristiques techniques 63
communication sans fil
 dispositif par défaut 48
 envoi automatique 48
 liaison, première fois 46
 lier dispositifs supplémentaires 49
 mode avion 46
 supprimer dispositif lié 50
 synchronisation de l'heure 49
 vue d'ensemble 45

D

date de péremption 11, 21
données objectif % 38

E

entretien, glycomètre 52

F

fournitures 67

G

garantie 68
glycémie, avertissement 14
glycémie basse 20
glycémie élevée 20

H

hyperglycémie 20
hypoglycémie 20

I

informations techniques 63

J

journal 36

L

limitations du produit 63

M

marquages, ajout aux résultats de glycémie 15
messages d'erreur 55
moyennes 37

N

nettoyage et désinfection 53

P

pires, remplacement 52
prélèvement sur site alternatif 17

R

réglages, glycomètre 25
 dernier résultat 34
 format d'heure 35
 heure/date 26
 langue 34
 objectifs de glycémie 27
 rappel d'analyse Après repas 32
 rappels d'analyse 31
 signal sonore 26
 tendances 29
renseignements sur la sécurité du produit 64
résultats de contrôle, hors de l'intervalle acceptable 23
résultats de glycémie, inhabituels 19

S

solution de contrôle 21
symboles
 DIV 66
 écran du glycomètre 9
 résultats de glycémie 15

T


tendances 41
test de contrôle, réalisation 21
touche, fonctions 7
transfert de données 43
 sans fil 43
 USB 44
type de la pile 63

MISE À JOUR : 2021-08

Canada

Accu-Chek Soins aux Patients : 1 800 363-7949

www.accu-chek.ca

 Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



ACCU-CHEK et ACCU-CHEK GUIDE sont des marques de Roche.



CONTINUA, les logos CONTINUA et CONTINUA CERTIFIED sont des marques, des marques de service ou des marques de certification de Continua Health Alliance. CONTINUA est une marque commerciale déposée dans certains pays où ce produit est distribué.

Le nom et les logos *Bluetooth*[®] sont des marques déposées du groupe Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Roche est soumise à un contrat de licence.

Tous les autres noms de produits et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2022 Roche Diabetes Care

07439873061A-0122

