

# Connecter votre glucomètre Accu-Chek® Guide à l'appli mySugr® et transformer des chiffres en de meilleurs résultats<sup>1</sup>


L'appli mySugr enregistre automatiquement vos données, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui impacte votre glycémie. Dites adieu aux journaux de bord papier!

Télécharger l'appli ici

C'est simple. Balayez le code QR avec votre téléphone, puis utilisez votre adresse courriel pour vous créer un compte.




## Voici comment connecter votre glucomètre Accu-Chek Guide à l'appli mySugr

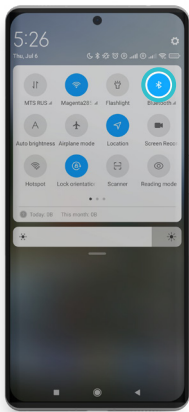


1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est allumée.




2. Dans l'appli mySugr, appuyez sur « Connexions » au bas de l'écran.

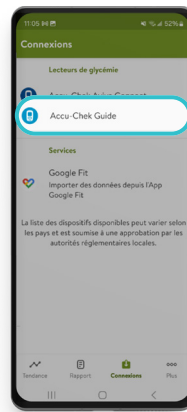

3. Sélectionnez votre appareil à partir de la liste.

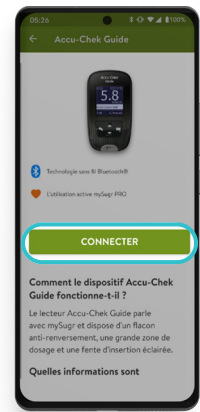


4. Appuyez sur « Connecter » pour débuter la connexion.

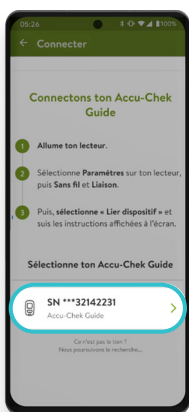

5. Suivez les instructions à l'écran.



6. Trouver le code PIN affiché sur votre glucomètre.

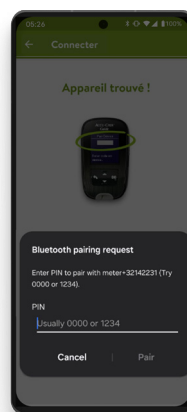

7. Lorsque demandé, entrez le code PIN pour connecter votre appareil.



8. Succès! Votre appareil est maintenant connecté à l'appli mySugr.