


## RETIREZ FACILEMENT UNE BANDELETTE DE VOTRE CONTENANT ANTI-RENVERSEMENT.

Utilisez votre pouce, ou le doigt le plus confortable pour vous, et essayez l'une de ces 4 techniques pour trouver laquelle vous convient le mieux.



### N'oubliez pas de suivre toutes les instructions de la notice produit, notamment :


- Lavez-vous les mains et essuyez-les complètement
- Assurez-vous de ne pas salir la bandelette
- Faites attention de ne pas plier les bandelettes
- Fermez bien le capuchon lorsque vous avez terminé

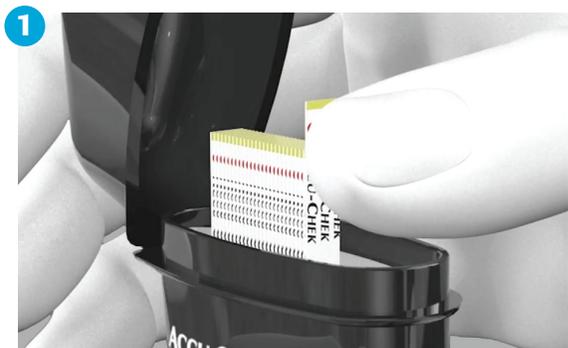

1 Placez n'importe quel doigt sur la première bandelette et appuyez tout en faisant glisser votre doigt vers le haut pour la soulever, puis retirez-la.



2 Saisissez les côtés de la première bandelette avec un action de pincement en tirant vers le haut.

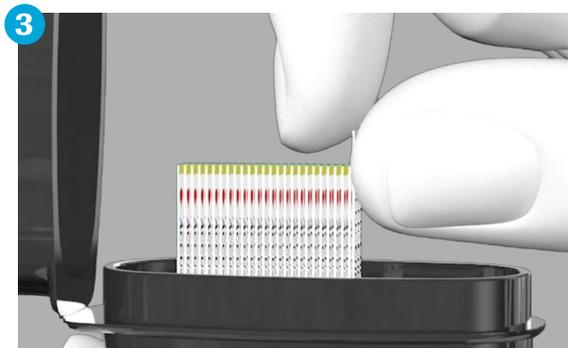

3 Placez votre index au-dessus des bandelettes. Ensuite avec votre pouce, appuyez contre les bandelettes et faites glisser la bandelette avant vers le haut pour la retirer d'un seul mouvement.



4 Placez votre doigt sur la dernière bandelette et appuyez contre les bandelettes. Faites glisser votre doigt vers le haut, puis retirez la bandelette d'un seul mouvement.

**ACCU-CHEK® Guide**



CONÇU POUR TENIR FERMEMENT  
LES BANDELETTES EN PLACE,

**MÊME À  
L'ENVERS.**